

My Buddy


My Buddy

Seating System By YUKI Trading

今、ご使用の車いすを、
もっと快適に座りませんか。

NEDO 開発助成製品（特許申請中）

スキューバダイビングの基本ルール用語で「Buddy」とは「相棒」という意味です。My Buddyは、ご使用者の安全で楽しい頼りがいがある相棒になればという願いを込めて開発しました。

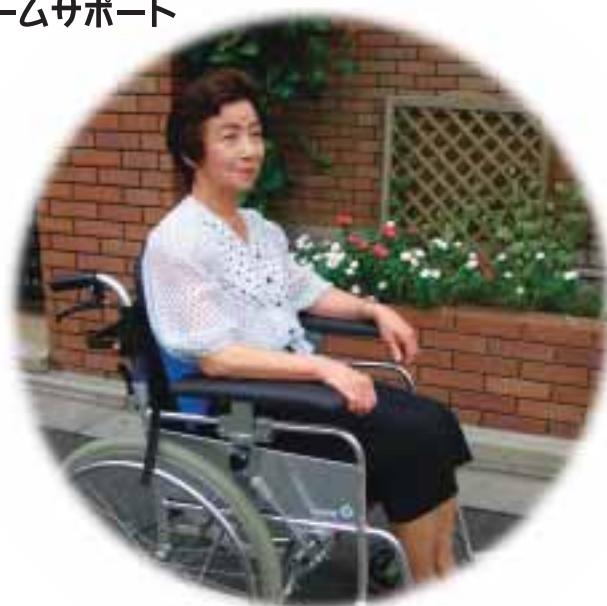

普通型車いすに、座はソロPSV、広幅アームサポート、バックサポートを取り付けています。

マイバディシーティングシステムは、長時間車いすに座られる方の姿勢補助具です。ご使用される方の身体の状態に合わせ、各々の製品を組み合わせでご使用下さい。マイバディシーティングシステムは、座面に高品質な座クッションを使う事で効果を発揮します。ご利用に際しては、シーティングの専門家・セラピストの方に適合して頂く事をお勧めします。

ご注意

車いすを自走される能力がある方がご使用の際、時としてその能力をさまたげる場合がありますのでご注意ください。

NEDO 開発助成製品 「レンタル対応リサイクル・シーティングシステムの開発」 開発コンセプト

- 環境配慮（循環）式座位補助具
- レンタル対応型座位補助具
- 多くの普通型車いす上で使用可能な座位補助具
- 高齢の介助者でも取り扱いが簡単な座位補助具


簡易座位能力分類：首都大学東京 健康福祉部作業療法科 木之瀬隆先生
(高齢者のシーティング2. 自立支援のリハビリテ - ションVol.1No.2,2003)参照

座位能力	座位の状況
I 座位に問題なし	特に姿勢が崩れたりせず座ることができる 自分で座りごちを良くする為に姿勢を変えることができる
II 座位に問題あり	姿勢が次第に崩れ、手で身体を支える 自分で姿勢を変えることができない
III 座位がとれない	座ると頭や身体がすぐに倒れる リクライニング車いすやベッドで生活

座位能力分類による製品使用の目安 (ご注意：座位能力分類と要介護度は必ずしも連動するものではありません。)

座位能力	要介護度	対応する座位補助具
I	要支援	マイバディ 広幅アームサポート (座クッション) (背クッション)
	要介護1	
II	要介護2	マイバディ バックサポートディープ・広幅アームサポート、 腕まくら (シーティング座クッション)
	要介護3	
III	要介護4	マイバディ バックサポートディープ・広幅アームサポート・ 腕まくら・ヘッドサポート (褥瘡予防シーティング座クッション)
	要介護5	

選定の流れ

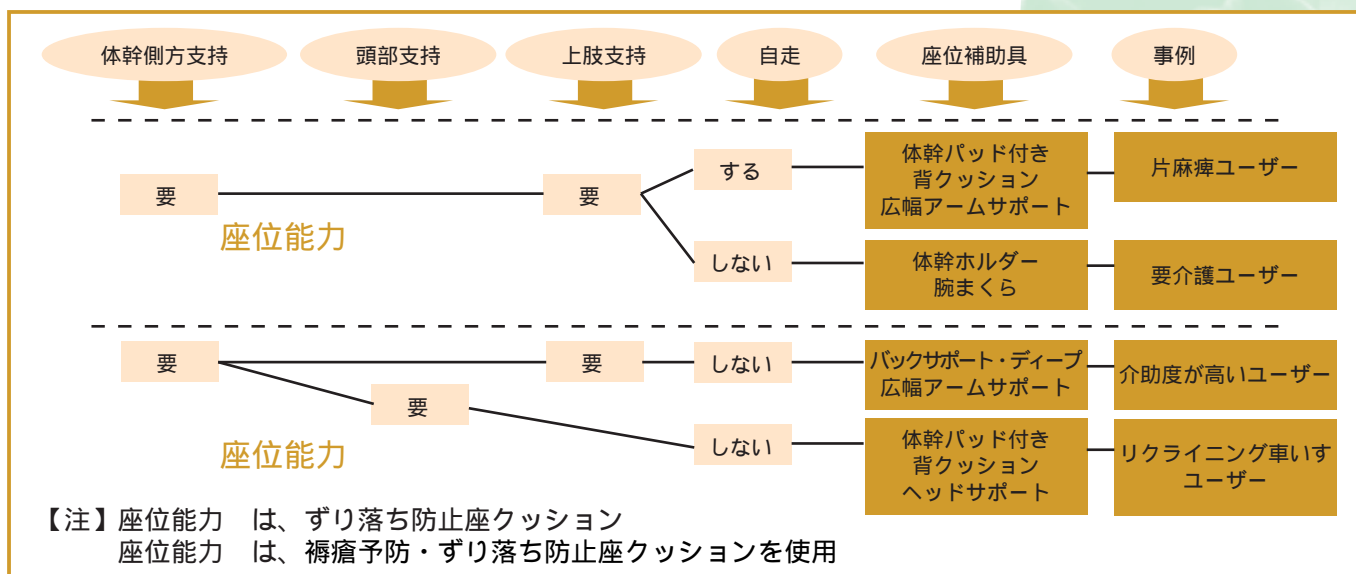

【リサイクルへのご協力】

本開発品は、リサイクル可能な素材を多く使用しています。本製品をご愛用いただいたのち、廃棄される場合は、当社においてリサイクルすることができます。なおその際、ご利用者の皆様にリサイクル費用の一部をご協力いただきたいと願っています。ご協力をいただける場合は、リサイクル方法など当社へお問い合わせ下さい。