

My Buddy


My Buddy

Seating System By YUKI Trading

今、ご使用の車いすを、
もっと快適に座りませんか。

NEDO 開発助成製品 (特許申請中)

スキューバダイビングの基本ルール用語で「Buddy」とは「相棒」という意味です。My Buddyは、ご使用者の安全で楽しい頼りがいがある相棒になればという願いを込めて開発しました。

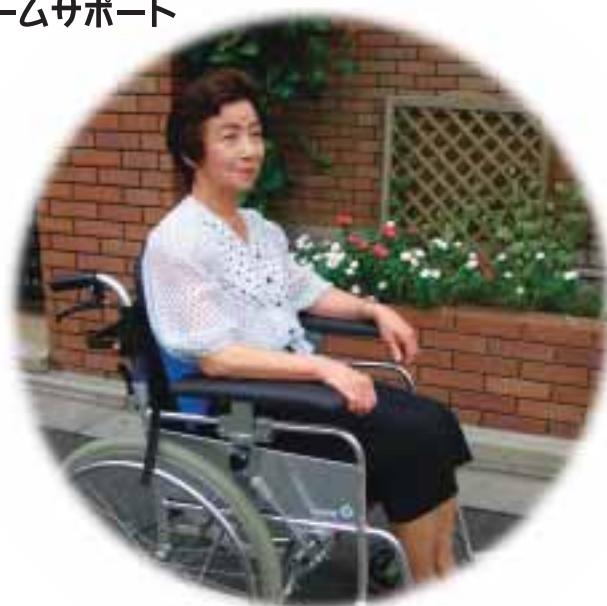

普通型車いすに、座はソロPSV、広幅アームサポート、バックサポートを取り付けています。

マイバディシーティングシステムは、長時間車いすに座られる方の姿勢補助具です。ご使用される方の身体の状態に合わせ、各々の製品を組み合わせでご使用下さい。マイバディシーティングシステムは、座面に高品質な座クッションを使う事で効果を発揮します。ご利用に際しては、シーティングの専門家・セラピストの方に適合して頂く事をお勧めします。

ご注意

車いすを自走される能力がある方がご使用の際、時としてその能力をさまたげる場合がありますのでご注意ください。

NEDO 開発助成製品 「レンタル対応リサイクル・シーティングシステムの開発」 開発コンセプト

- 環境配慮（循環）式座位補助具
- レンタル対応型座位補助具
- 多くの普通型車いす上で使用可能な座位補助具
- 高齢の介助者でも取り扱いが簡単な座位補助具


簡易座位能力分類：首都大学東京 健康福祉部作業療法科 木之瀬隆先生
(高齢者のシーティング2. 自立支援のリハビリテ - ションVol.1No.2,2003)参照

座位能力	座位の状況
I 座位に問題なし	特に姿勢が崩れたりせず座ることができる 自分で座りごちを良くする為に姿勢を変えることができる
II 座位に問題あり	姿勢が次第に崩れ、手で身体を支える 自分で姿勢を変えることができない
III 座位がとれない	座ると頭や身体がすぐに倒れる リクライニング車いすやベッドで生活

座位能力分類による製品使用の目安 (ご注意：座位能力分類と要介護度は必ずしも連動するものではありません。)

座位能力	要介護度	対応する座位補助具
I	要支援	マイバディ 広幅アームサポート (座クッション) (背クッション)
	要介護1	
II	要介護2	マイバディ バックサポートディープ・広幅アームサポート、 腕まくら (シーティング座クッション)
	要介護3	
III	要介護4	マイバディ バックサポートディープ・広幅アームサポート・ 腕まくら・ヘッドサポート (褥瘡予防シーティング座クッション)
	要介護5	

選定の流れ

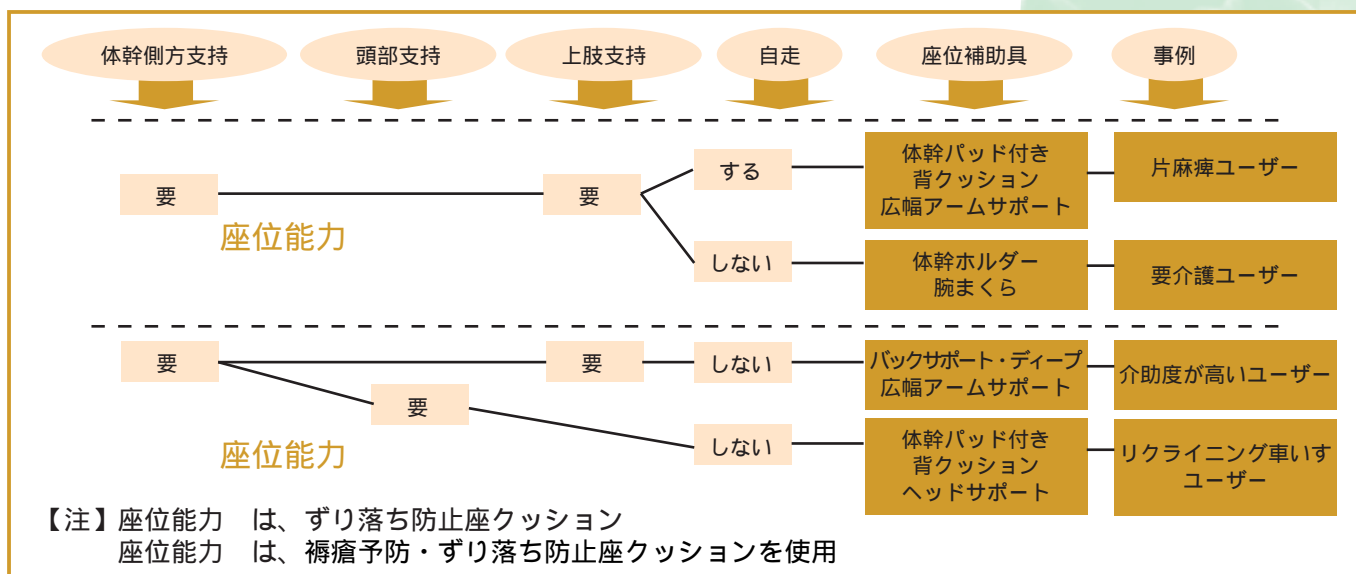

【リサイクルへのご協力】

本開発品は、リサイクル可能な素材を多く使用しています。本製品をご愛用いただいたのち、廃棄される場合は、当社においてリサイクルすることができます。なおその際、ご利用者の皆様にリサイクル費用の一部をご協力いただきたいと思います。ご協力をいただける場合は、リサイクル方法など当社へお問い合わせ下さい。

マイバディ ヘッドサポート


TAISコード 00468-000028

(商品コード MB01101)

25,000円(税込26,250円)

車いすの背パイプに簡単に着脱できるヘッドサポートです。ご使用者の首から頭を状況に合わせて様々な角度からサポートします。また、背パイプに取り付けるので後方からの介助が楽です。

ヘッドレストサイズ：幅270×縦180×奥行120mm

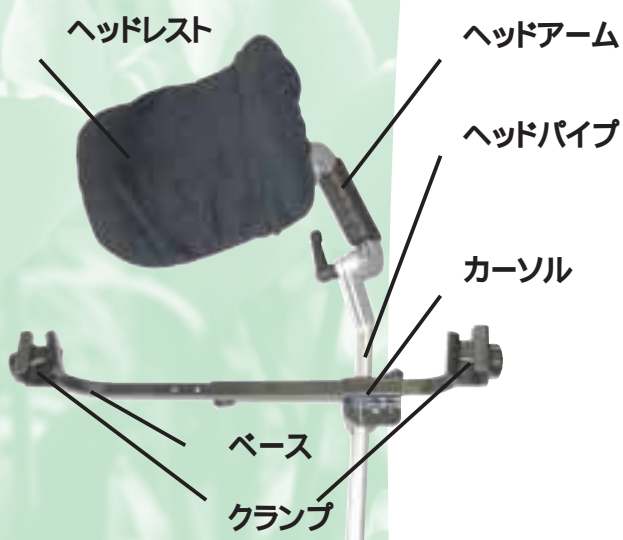

ヘッドレストは全方向に30度まで回転出来ます。以下の動きと連動しユーザーの首・頭部の位置に合わせて微調整が出来ます。

ヘッドアームは、前後に200mmの可動があり、後ろへ引いても介助者の邪魔をしません。

ヘッドパイプは、上下に180mm可動し自由に回転します。

カーソルは、ヘッドパイプを左右に270mm可動します。

ベースは、背パイプの外側の幅で375 - 480mmの車いすに取り付けが出来ます。

クランプは、背パイプの直径が19 - 28mmの車いすに取り付けが出来ます。



ヘッドアームが伸縮、前後に200mm可動し、ご使用者の頭部の位置に合わせてられます。



カーソルが270mm横に可動し、左右の斜め後方からも頭部を保持します。

マイバディ 腕まくら

TAISコード 00468-000027


円背などで前方へ姿勢が崩れやすい方にお薦めします。腕を身体の近くに置くことで姿勢が安定します。

表面のレザーは、防汚・抗菌・難燃加工が施されています。汚れが付き難く落としやすい特性です。裏面の地は一部滑り止め加工が施され、中のウレタンはより身体と大腿部のカーブに沿うように形作られています。

ポメルは、面ファスナーで簡単に着脱が出来ます。スリングシートのたるみなどで両足が内転される方にご使用下さい。両ひざの擦れを防ぎます。

ループは、左右に2箇所ずつ付いています。必要に応じベルト（製品に含まれていません）を付けられます。未使用時には、ベルトで車いすに吊り下げられますので感染の予防にもなります。

両側にベルクロが付いており、腕まくらの上にクッションやテーブルを固定する時便利です。

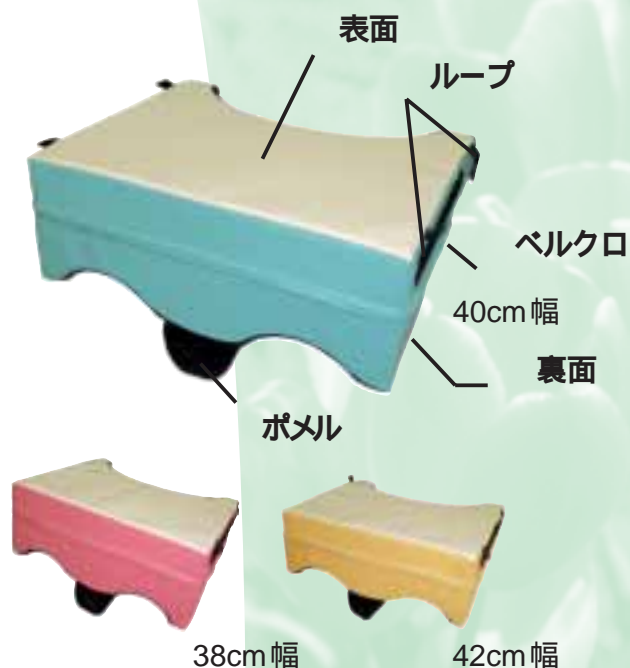

サイズの選択：左右のアームパイプの内側から内側の間の幅を目安に選択して下さい。

仕様につきましては予告なしに変更させていただく場合があります。

横幅	商品コード	
38	MB05138	サーモンピンク
40	MB05140	ブルーグリーン
42	MB05142	やまぶき色

9,800円(税込10,290円)

共通サイズ：奥行350×前高150・後高80(mm)

共通ポメル：幅75×前高65・後高35×奥行110(mm)



ご使用者の姿勢に合わせ、前方から支持します。円ばい（背骨が前方に弓のように曲がった姿勢）の方などの前方へ姿勢が崩れやすい方に、姿勢の安定を保持します。

マイバディ 広幅アームサポート

TAISコード 00468-000029


商品コード MB04101R(右用)

MB04101L(左用)

12,000円(税込12,600円)

ご使用の車椅子のアームサポートが低すぎて姿勢が横に崩れる方や片マヒで腕がずり落ちる方などにお勧めします。

アームパッドサイズ：幅100×長さ300×厚さ20mm

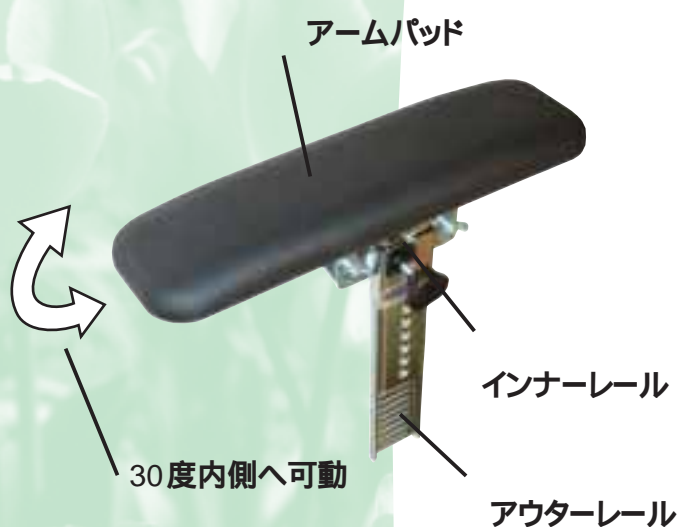

アームパッドは、広幅で安定が良く横へ2段階、縦に3段階可動します。ご使用者の腕を置く位置に合わせてご使用下さい。

インナーレールは、上下に120mm可動します。また、アームパッドの先端を内側に30度回転できます。ご使用者の腕の位置に合わせてご使用下さい。

アウターレールは、工具なしでアームパイプに取り付けが出来ます。ブレーキレバーの操作に邪魔にならない箇所に取り付けて下さい。

最初の設定は右用・左用となっていますが、2箇所ネジ位置を変更するとご自身で反対側用に設定を変える事が出来ます。



シーティング座クッションを使用した場合など、ご使用者の腕の高さに合わせて調節が出来ます。



ご使用者の腕の高さに合わせて調節



ご使用者の腕の向きに合わせて、内側に30度アームパッドを回転できます。



マイボディ バックサポート・ディープ

TAISコード 00468-000030

(商品コード MB03140)

19,000円(税込19,950円)

身体が横へ崩れやすい方にお薦めします。
体側(わき腹)はとてもデリケートです。
なるべく広い面積で支える構造にしました。

(ご注意)

バックサポート・ディープを車いすに取り付けると、前後左右ともにクッションの厚みで各々20 - 30mm狭くなります。身体サイズに合わせて車椅子は一回り大きいサイズをご利用下さい。

カバーは、通気の良いメッシュを使用しました。
本体は、身体になじみやすいウレタンフォームを使用しています。


ハード板をウレタンの外側に接着しました。体重が掛かる体側の強度を増やしています。

ハード板の真ん中に、丸い「くり抜き」を作りました。円背の方などの背骨の突起部分へ掛かる圧力を軽減します。

背ウェッジは、骨盤が後傾している方などの骨盤をサポートするときにご使用下さい。

価格・仕様につきましては予告なしに変更させていただく場合があります。

サイズ：幅400 × 高430 × 奥行200mm

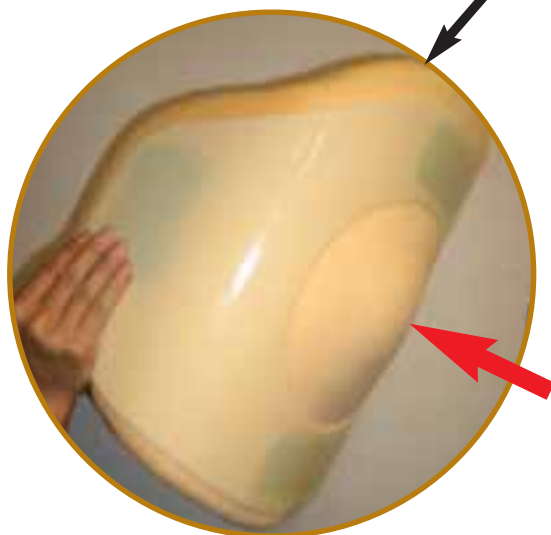

ハード板の真ん中がくり抜いてあり、円ばい(背骨が前方に弓のように曲った姿勢)の背骨の突部を保護し、姿勢を保持します。