

エア マイ整座 AIR

Yuki Trading

MB081

取扱説明書



サイズ：幅 / 約 40cm ・ 奥行 / 約 45cm ・ 高 / 約 5cm 重量：約 600g

素材：【クッションカバー】 ポリエステル 75% 合成ゴム 20% ポリウレタン 5%

【インナークッション(上段)】 ポリウレタンフォーム 90% ポリエステル 7% ポリウレタン 3%

【ベースフォーム(下段)】 ポリウレタンフォーム 100%

生産国：台湾

★クッションカバーは取り外して洗濯可能です。上段のインナークッションは手洗いが可能です。

★下段のベースフォームは洗う事は出来ませんのでご注意ください。

■お使いの前に

このたびは「マイ整座 AIR」をお買い上げいただき、ありがとう御座います。

この取扱説明書には「マイ整座 AIR」を安全にご使用いただくための注意事項が記載されています。


正しくご使用いただくために、必ずお読み下さい。

また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

お買い上げの製品は、改良のため一部においてこの取り扱い説明書と異なる場合があります。

ご不明な点がありましたら、販売店もしくは直接弊社までお問い合わせ下さい。


■クッションの方向

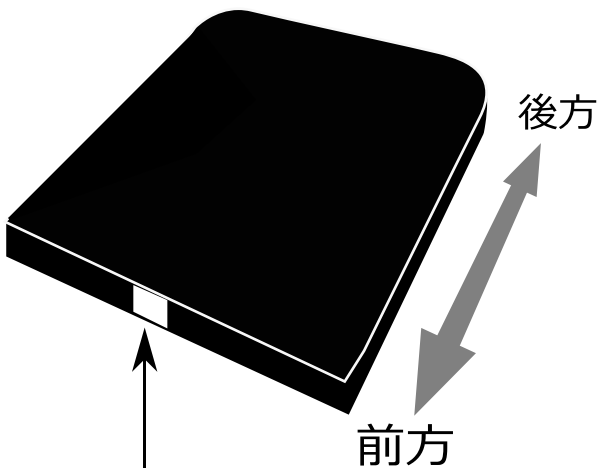

* [FRONT]と印字されたタグが付いている方が前方になります。

■インナークッションとベースフォームについて

⚠ インナークッションは、必ず黒いクッションが上になる様にカバーにお入れください。

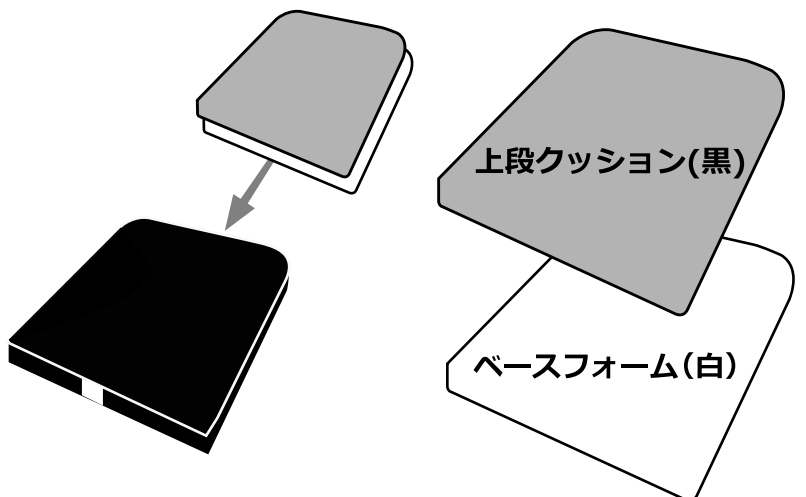

★上記のクッションは角の丸い方が後方となります。カバーの向きに合わせてお入れください。

■ご使用の際の注意点

- カバーと上段クッション(黒)のみ中性洗剤で洗えます。陰干しで自然乾燥させてください。タンブラー乾燥の使用はできません。
- ★下段のベースフォーム(白)は洗えません。ご注意ください。
- 素材が劣化する恐れがありますので、水周りや火気の近くなど高温になる場所で使用しないでください。また、水を含んだ場合は風通しの良い場所で陰干ししてください。
- 極端に低温または高温になる場所での保管や放置は品質を低下させる恐れがありますのでご注意ください。
- 保管の際は直射日光を避け、平らに置いてください。
- 痛みや疲労感には個人差があり、本製品はその軽減や緩和を保証するものではありません。

■インナークッション（上段）のお手入れについて

- インナークッションのお手入れについて
 - ・軽度の汚れは薄めた中性洗剤を布に染み込ませて拭き取ってください。
 - ・手洗いの際は中性洗剤を使用し、自然乾燥させてください。
 - ・乾燥機、アイロンの使用はできません。
- 消毒について
 - ・消毒液やアルコールを布に染み込ませて拭いてください。また、必ずメーカー指定の希釈倍率で使用してください。

保証規定

品質には万全を期しておりますが、開封時の不良や、通常の使用において故障が発生した場合は、下記規定により保証させていただきます。

- ①保証期間はご購入後1年間です。
- ②期間中に品質の不完全による故障が生じた場合は、無料にて修理・交換いたします。
- ③但し、以下の場合には保証対象外となります。
 - ・説明書にないご使用方法や、お取扱い上の不注意
 - ・製品に改造を加えた場合の故障
 - ・天災、地変による故障、損傷
 - ・ご使用によるキズやスレなど、通常の磨耗によるもの
 - ・カバーなど消耗品
 - ・保証書に販売店名、購入日等所定の記載が無き場合* 保証書に販売店の記入及び印がない場合は納品書や領収書など販売店及びご購入日が分かるものと一緒にこの保証書を保管してください。
- ④以上の保証は本製品を、日本国内にて使用した場合に限ります。

マイ整座 AIR 保証書

型番 **MB081**

保証期間 **ご購入日より1年間**

お客様ご記入欄

お名前

ご住所

電話番号

販売店様記入欄

店名

住所

電話番号

ご購入日

年

月

日

Yuki Trading

株式会社 ユーキ・トレーディング

〒110-0008 東京都台東区池之端2-5-46

TEL 03-3821-7331 / FAX 03-3821-7552

Email / info@yukitrading.com URL http://www.yukitrading.com