
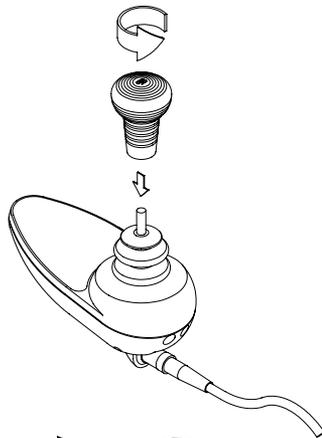
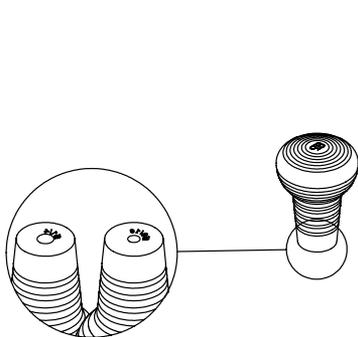


# ジョイスティックハンドル

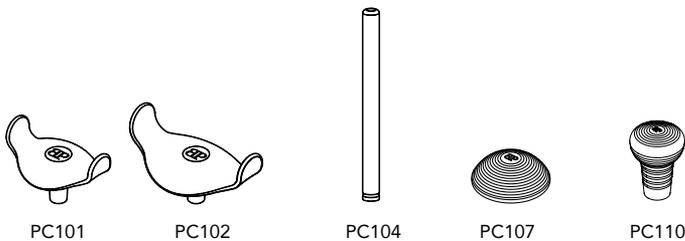

ジョイスティックハンドルは、可撓軸が5MM (3/16インチ) または 6.4MM (1/4インチ) ジョイスティックシステムにしっかりと固定されるよう設計されています。BODYPOINTの可撓軸付きジョイスティックハンドルはすべて、過度に引っ張られた場合、スチール製ジョイスティックシステム上で回転したり、滑って外れるよう設計されています。このような設計は、ジョイスティックボックスの損傷を防止することを目的としています。製品を改造して上記の機能を妨げることは推奨されません。

## 取付説明書


1. 金属製ジョイスティックシステムを洗浄して汚れや油分を取り除きます。
2. ハンドルを取付けやすくするため、金属製ジョイスティックシステムを湿らせます。
3. 金属製ジョイスティックシステムの基部付近をペンチで掴み、ジョイスティックボックスの傷つきやすい電子部品に押し込まれないようにします。
4. ジョイスティックハンドルをねじりながら金属製ジョイスティック軸に押し込みます。

## 保証

この製品には、オリジナルの消費者による正常な使用から生ずる材料および仕上がりにおける瑕疵に対する生涯限定保証が付いています。保証請求については、サプライヤーまたはBODYPOINTに連絡してください。

## PC110 の改造

ハンドルは、高さ最短28MM (1-1/8インチ) まで鋭利なナイフで切って (最適な結果が得られるよう、転がしながら切ることを推奨します) 短くすることができます。

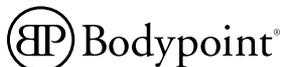


MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germany



# ジョイスティック取付けキットの取付・取扱説明書

ART NOS. PC202, PC205, PC206 & PC207

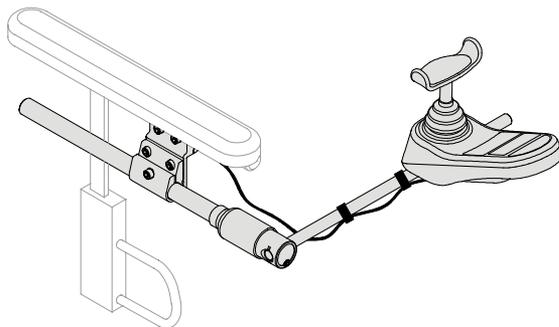

この説明書にはBodypointのすべてのジョイスティック取付けキットの安全な使用とメンテナンスに必要な重要情報が記載されています。使用者またはその介護人にこの説明書を渡し、内容を説明して、インストラクションが確実に理解されるようにしてください。

**▲注意:**取付け前に車椅子の電気系統の電源を切ります。

**保証:**この製品には、オリジナルの消費者による正常な使用から生ずる材料および仕上がりにおける瑕疵に対する生涯限定保証が付いています。保証請求については、サプライヤーまたはBodypointに連絡してください。


Bodypoint製品の詳細情報、および米国外の販売代理店の一覧は、[www.bodypoint.com](http://www.bodypoint.com)をご覧ください。

## パッケージの内容


パッケージは以下の一つ以上を含む場合があります。

- ・ジョイスティック取付けクランプ
- ・Tri-Lock™回転軸
- ・正中線アーム
- ・ジョイスティック取付けアダプタ
- ・クイックリリースレバー (オプション)


またはジョイスティック取付け完全キット。物品番号:PC201-、PC202-、PC203-、PC204-、PC205-

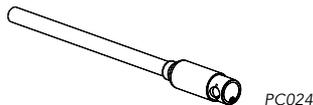

PC204

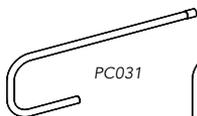

PC031

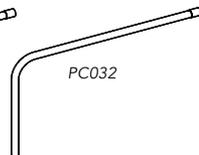

PC032



PC033



PC042




PC045




PC046



PC047

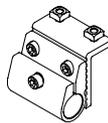

PC010

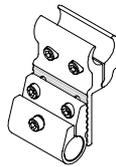

PC011




**BP** Bodypoint®

EC REP



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germany

CE




## ジョイスティック取付けクランプ

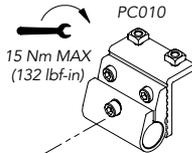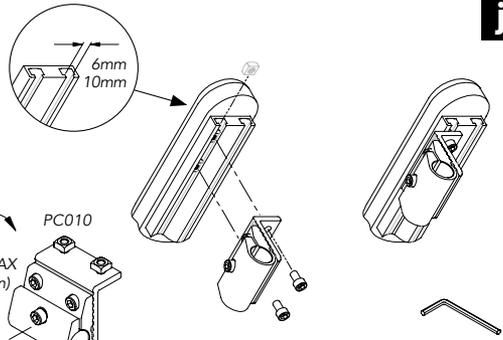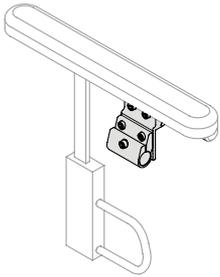

ジョイスティック取付けクランプは左右いずれかの側の肘掛けに取付けることができます。クランプを $\varnothing 22\text{mm}$  (7/8インチ) の肘掛けチューブに装着します。クランプをできるだけ遠くに配置して締めます。

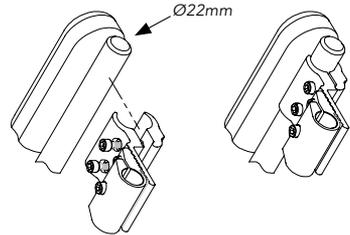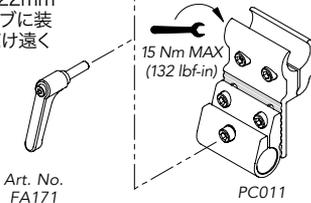


## TRI- LOCK™回転軸

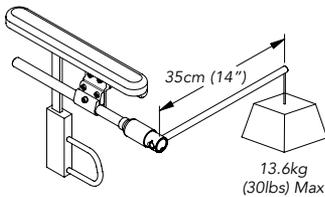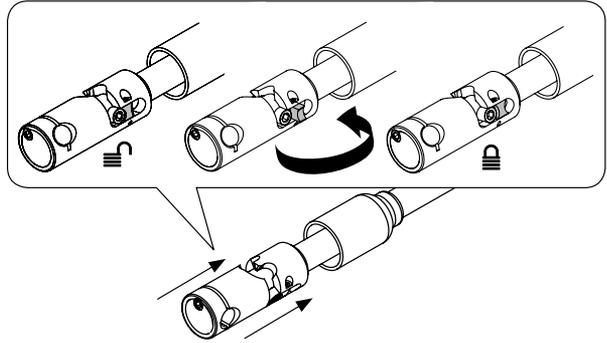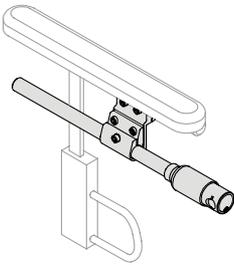


Tri-Lock回転軸は左右いずれかの側の取付けに適合します。取付けクランプの軸を回転させて回転の正しい位置を確認します。


反転停止でノンロックからロックに変換できます。0° 水平位置がロックされます。端部を押すとアンロックします。

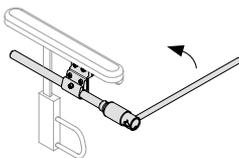

0° 駆動位置

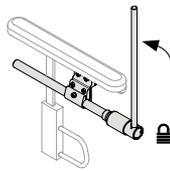

90° 縦向け


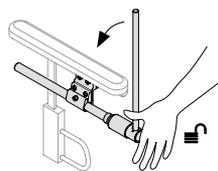


90° 端部を押すとアンロック




240° フル回転

正中線アーム

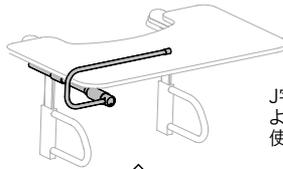
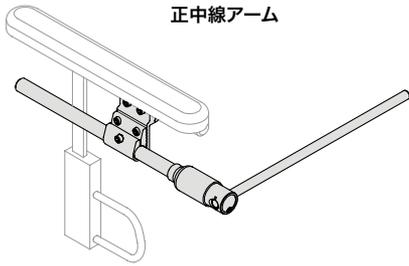


J字型正中線アームによりラップトレイ上での使用が可能です。

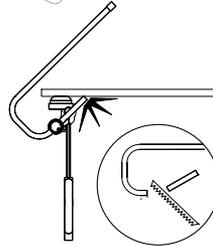

注:アルミニウムの小中線アームは弓のこを使用して所望の長さに切ることができます。


ジョイスティック取付けアダプタ

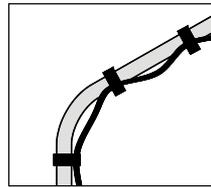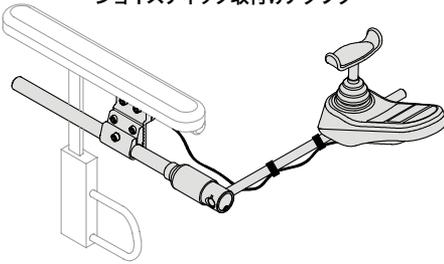

同梱のナイロン帯に緩み線を装着します。

INVACARE

Art. No. PC042

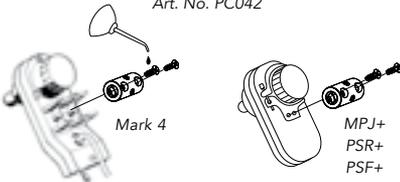


Mark 4

MPJ+  
PSR+  
PSF+





PGDT R-NET & VSI

Art. No. PC046

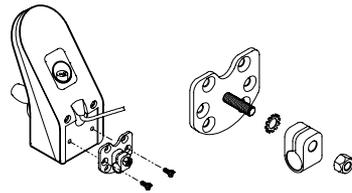

PGDT PILOT PLUS

Art. No. PC045

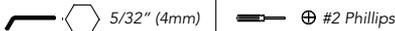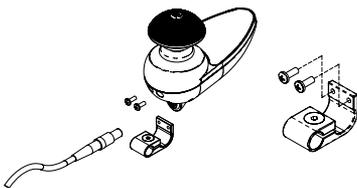

COMPACT JOYSTICKS

Art. No. PC047

