


押しボタン式バックルカバー

ART NOS. FS018C, FS019C, FS018D & FS019D

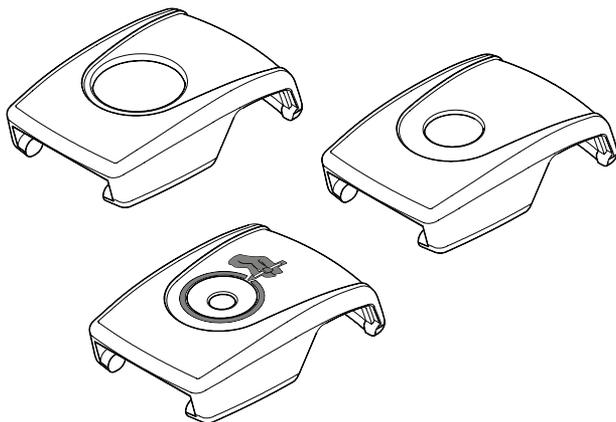

⚠ 警告! 本製品が誤って外れると、使用者が滑り抜けたり、車椅子から落ちたりする可能性があります。使用者の動作または認識能力によって誤って外れる可能性がある場合、使用中は常に介護人が付き添う必要があります。介護人は必ず本製品の外し方を知っておく必要があります。これができないと、緊急時に取り外しが遅れる恐れがあります。

保証: この製品には、オリジナルの消費者による正常な使用から生ずる材料および仕上がりにおける瑕疵に対する生涯限定保証が付いています。保証請求については、サプライヤーまたはBodypointに連絡してください。

Bodypoint製品の詳細情報、および米国外の販売代理店の一覧は、www.bodypoint.comをご覧ください。

FS018C-1およびFS019C-1安全バックルカバー

⚠ 警告! 本製品は使用者による不意のベルト解放の予防を意図しています。本製品の不適正使用により、緊急時に使用者が車椅子に捕らわれる可能性があります。本製品の使用中は常に開放工具を持った介護人が付き添わなければなりません。医師が危険を熟考して使用者の安全を増すと判断しない限り、拘束具として本製品を使用することは避けてください。


警告! バックルの中で折れる場合のある道具の使用は避けてください。定期的にバックルを取外し、破片や障害物がないか確認してください。

 Bodypoint®


 EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

 CE

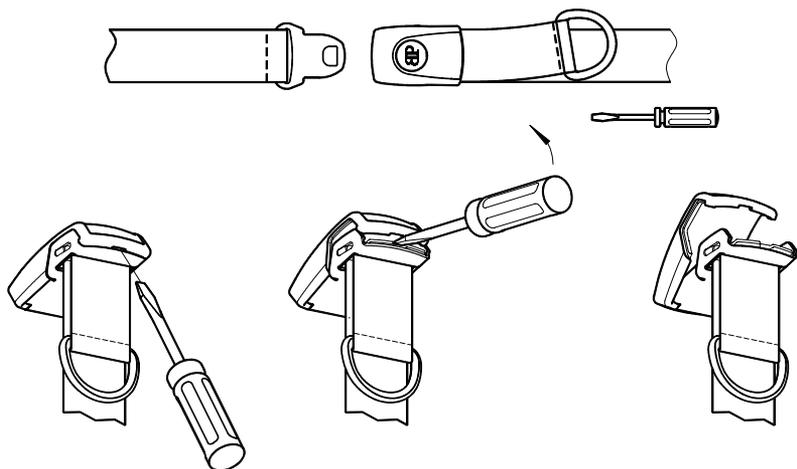

カバーを取り外します。

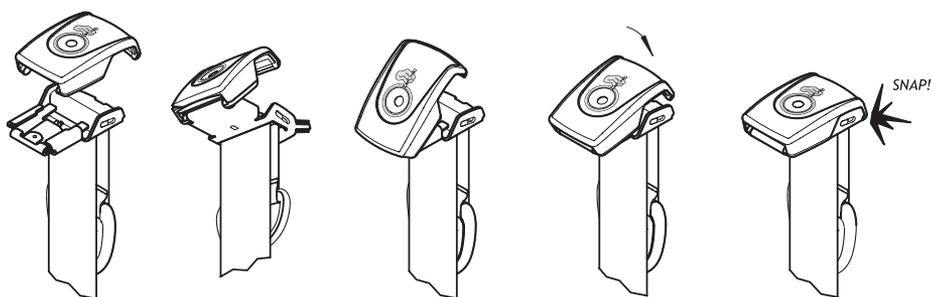

新しいカバーを付けます。

