
## ベルト取付け延長キットの取付 ・取扱説明書

ART NO. HKA12-1

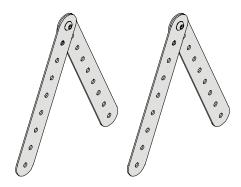


この説明書にはBodypointのすべてのベルト取付け延長キットの安全な使用とメンテナンスに必要な重要情報が記載されています。使用者またはその介護人にこの説明書を渡し、内容を説明して、インストラクションが確実に理解されるようにしてください。

車椅子や座位保持装置への取付けには、オプションのBodypointベルト取付けハードウェアを使用することができます。


本製品は取付け位置決めベルトやハーネスの取付けを意図しています。輸送用安全装置としての使用は意図していません。

保証:この製品には、オリジナルの消費者による正常な使用から生ずる材料および仕上がりにおける瑕疵に対する生涯限定保証が付いています。保証請求については、サプライヤーまたはBodypointに連絡してください。

Bodypoint製品の詳細情報、および米国外の販売代理店の一覧は、www.bodypoint.comをご覧ください。

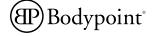



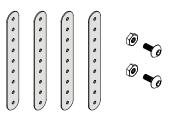



- ・4 延長ストラップ
- ・2 M6 x 12トラス頭穴付きキャップねじ
- · 2 M6ナイロックナット








取付けのオプション 延長ストラップはFrameSaver™クランプ、バ ンドクランプ、またはフレームクランプを使用し て車椅子に装着することができます。M6 6mm (1/4インチ) ねじ (同梱されていません) を使 用してフレームまたは固いシートに直接取付 けます。







同梱のM6ねじとナイロックナットはFlat-Mount™と Cinch-Mount™エンド フィッティングと共に機能します。

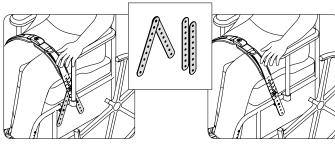

狭い空間にフィットするよう揃えたストラップ。

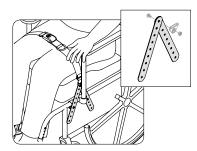

障害物を跨いで広げたストラップ。

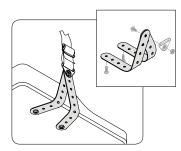

Evoflex®骨盤安定器延長具。 延長ストラップを曲げて固いシートの底部に直 接装着することができます。取付けねじには最 低90kg (200ポンド) の引抜き強度がなけれ ばなりません (同梱されていません)。



延長ストラップを所望の長さに切ります。切断箇所は使用中の取付け穴からできるだけ遠くにします。