



Bodypoint®



株式会社ユーキ・トレーディング

## 1. ベルトタイプ



### 2ポイントベルト

シンプルで使いやすく、お手入れ簡単なパッド付きヒップベルトは、姿勢を快適にサポートします。



### 4ポイントベルト

前滑りや非対称な姿勢に対処でき、セカンドベルトはメインベルトの上下前後へのズレを防ぎます。



### エポフレックス

エポフレックスは直立状態を保持するので、簡単に装着することができます。固定マウント無しでの取付けも可能です。

## 2. バックルタイプ



### プッシュボタン

丸みを帯びた形状は、引っかかりを防ぎます。カバーを取り外して汚れの除去やバックルの交換が可能です。



### サイドリリース

軽量、破損しにくくアクシデントで外れるリスクが低いバックルです。



### リハブラッチ

手の不自由な方でも比較的操作しやすいバックルです。



### スイベルバックル

薄型、高い強度を誇り、可動式のバックルは力の偏りを減少させ、お身体への負担を軽減します。



### スモールプッシュボタン

強度もあり、薄型タイプの小型バックル。お子さまや小柄な方へおすすめです。

## 2. プルタイプ

### センタープル

力の弱い方や緊張の低い方へおすすめです。



### デュアルプル

体重の変化や衣服の着脱に対応するために調整機能に優れたバックル。サイドリリースタイプのみ。



### リアプル

筋緊張が高い方や骨盤の回旋がある方へおすすめです。骨盤を適切なポジションへ調整しながら締め込む事ができます。



## 返品・交換

サイズ間違いや予定変更などによる返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください。ご注文の際は次ページをご参照いただき、正確な品番にてご注文お願いいたします。

## 2、4点式ヒップベルトサイズチャート

※ 現行の品番は以前の品番と異なっておりますので、各項目をご確認の上、ご注文くださいますようお願いいたします。


### 手順 1



### 手順1.

ヒップベルトが最も効果的に働く位置と角度をハンドリングで確認し、ポジションを決定します。

### 手順 2

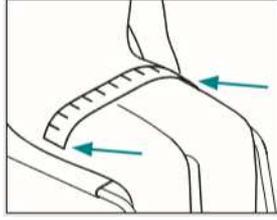

### 手順2.


柔らかいメジャーで、1で確認したポジションの長さを測定します。これは**ベルトのパッドの長さ(B)**に相当。

### 手順3.

ベルトのサイズを選択します。


### 手順 3

#### センタープル&デュアルプル式ヒップベルト

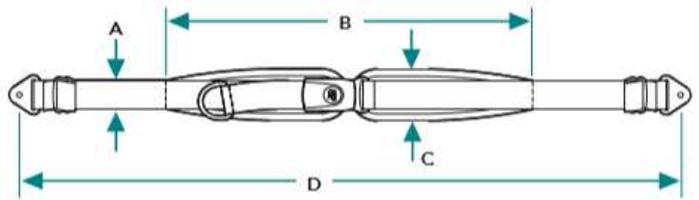

Size*	A**	B	C	D
S32	2.5cm (1")	32cm (12-1/2")	4.5cm (1-3/4")	117cm (46")
S38	2.5cm (1")	38cm (15")	5cm (2")	117cm (46")
M36	4cm (1-1/2")	36cm (14")	5.5cm (2-1/4")	130cm (51")
M46	4cm (1-1/2")	46cm (18")	5.5cm (2-1/4")	142cm (56")
L62	5cm (2")	62cm (24-1/2")	7cm (2-3/4")	155cm (61")
L82	5cm (2")	82cm (32")	9cm (3-1/2")	206cm (81")
L92	5cm (2")	92cm (36")	10cm (4")	206cm (81")

#### リアプル式ヒップベルト

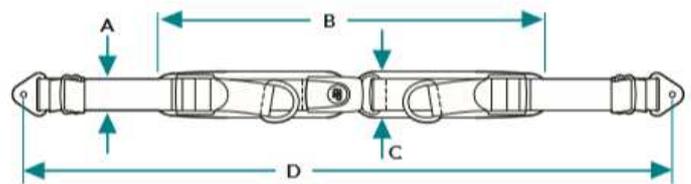

Size*	A**	B	C	D
S38	2.5cm (1")	38cm (15")	5cm (2")	117cm (46")
M40	4cm (1-1/2")	40cm (15-3/4")	5.5cm (2-1/4")	142cm (56")
M46	4cm (1-1/2")	46cm (18")	5.5cm (2-1/4")	142cm (56")

## HB205-M46

**M=4cm**(ベルト幅)


**46=左右パッドを合わせた長さ**

ベルト幅 = **S/2.5cm**、**M/4cm**、**L/5cm**

### パッドの長さについて

現行製品は同じベルト幅でもパッドの長さの選択が必要になります。

※ **S38**、**M36**を比較しますと、ベルト幅はSの方が狭いですが、パッド長はM36よりS38の方が長くなります。  
ご選択の際はご注意ください。

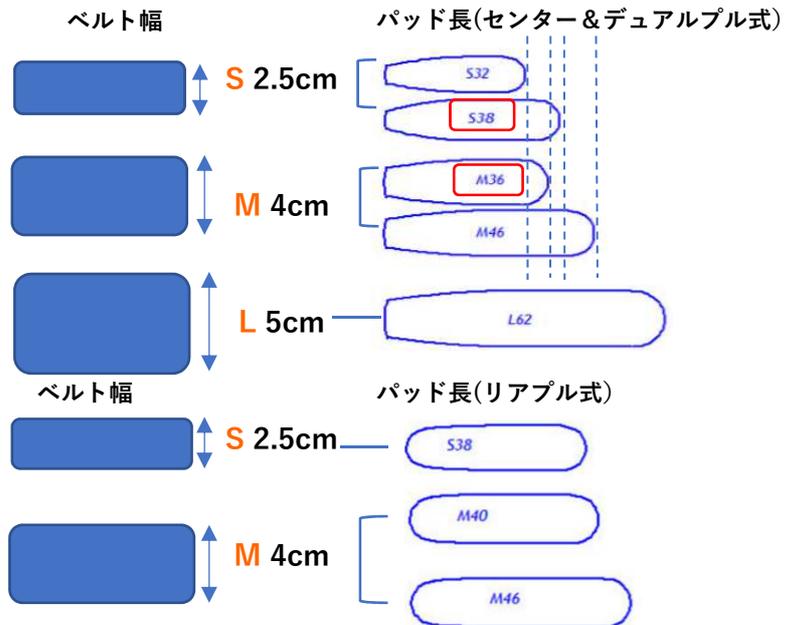

### ヒップベルト付属品

**シンチマウント** 長所：ベルトの取付設定が簡単。  
ベルトの長さ調整が簡単。  
短所：分厚い為スペースが必要。



**フレームセーバー** 左記シンチマウントをフレーム取付ける際に使用するクランプ。パイプ径22mmに取付できるようシムも同梱されています。パイプ径19mmへの取付は別売のシムが必要です。P10参照

製品画像/説明	バックル	製品コード	価格	完成用部品
HB 2点式ヒップベルト センタープル 	プッシュ(小)	HB235-S32-A2	12,400	
		HB235-S38-A2	*14,000	●
	プッシュ	HB205-M36-A2	13,700	●
		HB205-M46-A2	14,300	●
		HB205-L62-A2	15,900	
		HB215-S32-A2	9,900	
	サイド リリース	HB215-S38-A2	*11,200	●
		HB215-M36-A2	10,600	●
		HB215-M46-A2	11,200	●
		HB215-L62-A2	11,800	●
	リハブラッチ	HB225-M36-A2	15,200	
		HB225-M46-A2	15,600	
		HB225-L62-A2	16,400	
	スイベル	HB275-S32-A2	13,800	
		HB275-S38-A2	13,800	
		HB275-M36-A2	14,300	
HB275-M46-A2		14,800		
製品画像	バックル	製品コード	価格	完成用部品
HB 2点式ヒップベルト デュアルプル 	サイド リリース	HB216-S32-A2	9,900	
		HB216-S38-A2	*11,200	●
		HB216-M36-A2	10,600	●
		HB216-M46-A2	11,200	●
		HB216-L62-A2	11,800	●
HB 2点式ヒップベルト リアプル 	プッシュ(小)	HB239-S38-A2	17,200	
	プッシュ	HB209-M40-A2	16,200	●
		HB209-M46-A2	16,800	●
	サイド リリース	HB219-S38-A2	14,100	
		HB219-M40-A2	14,700	
		HB219-M46-A2	15,200	
	リハブラッチ	HB229-M40-A2	18,200	
HB229-M46-A2		18,700		
HB 4点式ヒップベルト センタープル 	プッシュ(小)	HB435-S32-A2	16,200	
		HB435-S38-A2	*18,400	●
	プッシュ	HB405-M36-A2	*19,700	●
		HB405-M46-A2	*20,500	●
		HB405-L62-A2	*21,200	●
		HB415-S32-A2	14,300	
	サイド リリース	HB415-S38-A2	*16,200	●
		HB415-M36-A2	15,600	●
		HB415-M46-A2	16,200	●
		HB415-L62-A2	16,800	●
		HB425-M36-A2	20,500	
	リハブラッチ	HB425-M46-A2	21,000	
		HB425-L62-A2	21,700	
	スイベル	HB475-S38-A2	17,800	
		HB475-M46-A2	18,800	
HB 4点式ヒップベルト デュアルプル 	サイド リリース	HB416-S32-A2	14,900	
		HB416-S38-A2	*16,900	●
		HB416-M36-A2	16,200	●
		HB416-M46-A2	16,800	●
		HB416-L62-A2	16,800	●

HB 4点式ヒップベルト リアプル  	プッシュ(小)	HB439-S38-A2	22,500	
	プッシュ	HB409-M40-A2	21,200	●
		HB409-M46-A2	21,800	●
	サイド リリース	HB419-S38-A2	19,400	
		HB419-M40-A2	20,100	
		HB419-M46-A2	20,500	
リハブラッチ	HB429-M40-A2	23,600		
	HB429-M46-A2	24,000		

### その他ヒップベルト

#### レッグハーネス



痙攣や緊張の発生により、車いすから滑り落ちる傾向があるユーザーへシンプルな解決方法です。パッド付きのストラップは、体幹の前後の動きを制限することなく、または膀胱を圧迫することなく、大腿部の内側からしっかりと保持します。ヒップベルトの使用の有無にかかわらずご使用いただけます。

#### レッグハーネスのサイズ選択

ASISから大腿部内側のシート面までの距離を計測。=(パッドのサポート長)

**S : 20~28cm、M : 28~36cm、L : 36~41cm**

レッグハーネス	サイド リリース	LH600S-A2	*13,000	●
		LH600M-A2	*14,800	●
		LH600L-A2	*14,800	●

#### サブASISパッド



骨盤へのサポート力や安定をより高めます。  
痩せ型の方への骨盤サポートでの痛み等にお困りの方、膀胱への圧迫軽減や皮膚の弱い方へのヒップベルトのご利用の際にも最適です。

#### ASISサブパッドのサイズ選択

骨盤のサイズに合わせて選択します。(下記目安参照)


PAD402-2 : 2.5cm幅のベルト(S)

PAD401-2 : 4cm/5cm幅のベルト(M/L)

サブASISパッド	PD401-2	10,900	
	PD402-2	10,900	

### サブASISパッドが取付けできるベルト (LBシリーズ & エポフレックス)

製品画像	バックル	製品コード	価格	完成用部品
LB 2点式ヒップベルト センタープル  	プッシュ(小)	LB235-S38-A2	16,000	
	プッシュ	LB205-M46-A2	16,100	
		LB205-L62-A2	16,800	
	リハブラッチ	LB225-M46-A2	16,500	
LB225-L62-A2		17,300		
LB 2点式ヒップベルト リアプル	プッシュ	LB209-M46-A2	20,000	
	リハブラッチ	LB229-M46-A2	20,200	
LB 4点式ヒップベルト センタープル	プッシュ(小)	LB435-S38-A2	20,400	
	プッシュ	LB405-M46-A2	21,400	
		LB405-L62-A2	22,200	
	リハブラッチ	LB425-M46-A2	21,900	
LB425-L62-A2		22,700		
LB 4点式ヒップベルトデュアルプル	サイドリリース	LB416-S38-A2	17,300	
LB 4点式ヒップベルト リアプル	プッシュ	LB409-M46-A2	24,000	
	リハブラッチ	LB429-M46-A2	24,900	
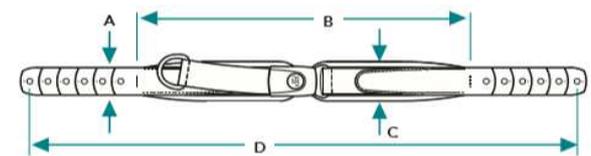
<p><b>エボフレックス</b></p> 	<p>補強されたストラップは、ベルトを直立状態に保持するので、簡単に装着することができます。これで移乗後のベルトを探して手繰りよせる作業から解放されます。</p>	<p><b>Evoflex®</b></p>  <table border="1" data-bbox="829 291 1436 403"> <thead> <tr> <th>Size*</th> <th>A**</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S38</td> <td>2.5cm (1")</td> <td>38cm (15")</td> <td>5cm (2")</td> <td>63cm (24-3/4")</td> </tr> <tr> <td>M46</td> <td>4cm (1-1/2")</td> <td>46cm (18")</td> <td>5.5cm (2-1/4")</td> <td>76cm (29-3/4")</td> </tr> <tr> <td>L62</td> <td>5cm (2")</td> <td>62cm (24-1/2")</td> <td>7cm (2-3/4")</td> <td>96cm (37-3/4")</td> </tr> </tbody> </table>	Size*	A**	B	C	D	S38	2.5cm (1")	38cm (15")	5cm (2")	63cm (24-3/4")	M46	4cm (1-1/2")	46cm (18")	5.5cm (2-1/4")	76cm (29-3/4")	L62	5cm (2")	62cm (24-1/2")	7cm (2-3/4")	96cm (37-3/4")
Size*	A**	B	C	D																		
S38	2.5cm (1")	38cm (15")	5cm (2")	63cm (24-3/4")																		
M46	4cm (1-1/2")	46cm (18")	5.5cm (2-1/4")	76cm (29-3/4")																		
L62	5cm (2")	62cm (24-1/2")	7cm (2-3/4")	96cm (37-3/4")																		

製品画像	バックル	製品コード	価格	完成用部品
<p>エボフレックス</p> 	プッシュ小	EB235-S38	15,500	
	プッシュ	EB205-M46	16,500	
		EB205-L62	17,300	
	スイベル	EB275-S38	14,800	
		EB275-M46	15,800	
	リハブラッチ	EB225-M46	17,000	
EB225-L62		17,800		

**体幹サポートハーネス Uppre body positioning**

**2019 NEW MDシリーズ**

MDプルストラップでフロントプルとリアプルの選択を各々のニーズに合わせて、その場で簡単にプルスタイルを設定および変更できます。




フロントプル



リアプル

**サイズ選択**

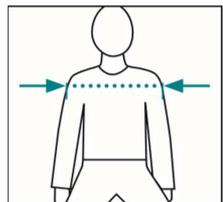

三角筋を含む  
肩の最大幅を測定。

サイズ	肩幅
XXS	21-24cm
XS	24-28cm
S	28-33cm
M	33-41cm
L	41-48cm
XL	48-56cm

**付属品**



※品番最後の番号を-B5へ変更いただくとフラットマウントをご利用いただけます。

**別売**



グロメットストラップ  
**SH025-2** (¥3,800)

<p><b>ステイフレックス</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特許を取得したデュアルゾーン構造により、ユーザーが前傾した際に、胸サポート部の上方(頸部側)へのズレを防ぎます。</li> <li>・ストレッチと保持力を絶妙にバランスをとるユニークな素材とデザイン。</li> <li>・積極的な肩の動きを阻害せず、体幹を安定させます。</li> </ul> <p>形状はスタンダードとナロータイプが選べます。(ナローは女性にフィットします)ジッパーの有無も選択もいただけます。</p>
--	--

製品画像	プルタイプ	製品コード	価格	旧品番
<p>ステイフレックススタンダード ジッパータイプ</p> 	MD	SH350S-B6	21,800	SH310 (完成用部品掲載)
		SH350M-B6	22,400	
		SH350L-B6	23,700	
		SH350XL-B6	24,300	SH320

製品画像	プルタイプ	製品コード	価格	旧品番
ステイフレックススタンダード ジッパー無し 	MD	SH351XS-B6	23,300	SH311 SH321
		SH351S-B6	23,300	
		SH351M-B6	23,900	
		SH351L-B6	23,900	
		SH351XL-B6	24,800	
ステイフレックスナロー ジッパータイプ 	MD	SH360M-B6	24,500	SH330 SH340
		SH360L-B6	24,500	
		SH360XL-B6	25,400	
ステイフレックスナロー ジッパー無し 	MD	SH361M-B6	23,900	SH331 SH341
		SH361L-B6	23,900	
		SH361XL-B6	24,800	

<b>ピボットフィット</b> 	<p>ピボットフィットは自社デザインのスイベルバックルで、ユーザーの最適なポジションにフィットします。ズレも少なくベルトの長さ調整も簡単です。</p> <p>簡単なスナップ&amp;リリースは、ユーザー、介助者にもとても便利です。</p> <p>子供にとっては簡単には取り外せないの、いたずらでの取外しも防止します。</p> <p>スイベルバックルの引張り強度はISO基準の4倍。他のバックルも含め最大の強度を誇ります。</p>
---	--

製品画像	プルタイプ	製品コード	価格	旧品番
ピボットフィット 	MD	SH295XXS-B6	19,300	SH270 (完成用部品掲載)
		SH295XS-B6	19,300	
		SH295S-B6	19,900	
		SH295M-B6	19,900	SH280
		SH295L-B6	21,200	
		SH295XL-B6	21,200	

<b>トリムライン</b> 	<p>肩を後方へサポートし、胸郭を開く姿勢をとる時に有効なサポートです。</p> <p>トリムラインは、片側のみに使用も可能です。</p> <p>胸骨を横切ってクロススタイルでも使用可能です。</p>		クロススタイル
--	--	---	---------

製品画像	プルタイプ	製品コード	価格	旧品番
トリムライン ショルダーハーネス 	MD	SH235S-B6	16,500	SH230
		SH235M-B6	16,500	
		SH235L-B6	17,200	SH240

 <p>MDシリーズより付属のマウントがプラスチック製に変更されています。金属製マウントをご希望の際は別途ご注文願います。</p>		<p><b>体幹サポートハーネス、モノフレックスにはフレームセーバーは同梱されていませんのでご利用の際は別途ご注文願います。</b></p>
--	---	--

## Hスタイルハーネス

Hスタイルハーネスは胸郭サポートハーネスのスタンダードタイプです。

サイドリリース式バックルを採用。ベルトの長さ調整はオス側バックルのベルト取付け部で行います。

製品画像	プルタイプ	製品コード	価格	完成用部品
	フロントプル	SH210S-B2	*19,700	●
		SH210M-B2	*19,700	●
		SH210L-B2	*21,200	●
		SH210XL-B2	*21,200	●
	リアプル	SH220S-B2	*19,700	●
		SH220M-B2	*19,700	●
		SH220L-B2	*21,200	●
		SH220XL-B2	*21,200	●

## 2019 NEW ショルダーハーネスストラップガイド

	 <b>HW100-200-2</b> 全長200mm	 <b>HW100-150-2</b> 全長150mm
	ロングタイプ	ショートタイプ

## 2019 NEW ストラップガイド取付アダプター


	 <b>HW105L-1</b> 横全長 270mm 縦全長 75mm	 <b>HW105S-1</b> 横全長 185mm 縦全長 75mm
	ロングタイプ	ショートタイプ

製品名	製品コード	価格	完成用部品
ショルダーハーネスストラップガイド/ロング	HW100-200-2	6,800	
ショルダーハーネスストラップガイド/ショート	HW100-150-2	6,300	
ストラップガイド取付アダプター/ロング	HW105L-1	5,300	
ストラップガイド取付アダプター/ショート	HW105S-1	4,800	

## モノフレックス ワンピース





より多くのサポート面が必要な方へおすすめ。  
ストレッチ素材で長時間のご使用も快適。  
胸部、腹部、下肢にもご使用いただけます。

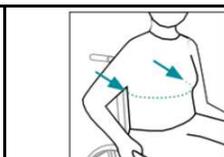

着用される高さでパッドがサポートする体幹回りを計測

サイズ	パッド長	パッド幅
XS	31cm (12-1/4")	7cm (2-3/4")
S	39.5cm (15-1/2")	7.5cm (3")
M	46.5cm (18-1/4")	10cm (4")
L	54.5cm (21-1/2")	11.5cm (4-1/2")
XL	62cm (24-1/2")	12.5cm (5")

製品画像	バックル	製品コード	価格	完成用部品
	両サイド スイベル バックル	SH120XS-B2	14,100	
		SH120S-B2	14,100	
		SH120M-B2	14,700	
		SH120L-B2	14,700	
		SH120XL-B2	15,300	
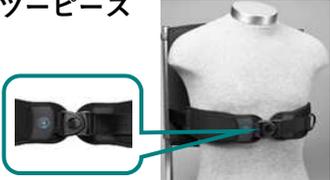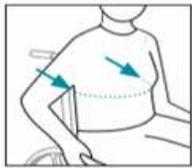
<b>モノフレックス ツーピース</b> 	センターリリース式のスイベルバックル、これにより体幹の動きへの追従性が向上。ラテラルサポートなどとの併用におすすめです	 着用される高さでパッドがサポートする体幹回りを計測	サイズ      パッド長      パッド幅	
			XS      31cm (12-1/4")      5.5cm (2-1/4") S      39.5cm (15-1/2")      6.5cm (2-1/2") M      46.5cm (18-1/4")      8cm (3-1/4") L      54.5cm (21-1/2")      9cm (3-1/2") XL      62cm (24-1/2")      9.5cm (3-3/4")	

製品画像	バックル	製品コード	価格	完成用部品
モノフレックス ツーピース  	センタースイベルバックル	SH122XS-B2	16,300	
		SH122S-B2	16,300	
		SH122M-B2	16,800	
		SH122L-B2	16,800	
		SH122XL-B2	17,300	

**ユニバーサル・エラスチックストラップ**

作業、遊び、スポーツ、セラピー、フィッティングなど様々な場面で活躍するポジショニングストラップ。伸縮性が高く、特に丈夫なネオプレンを使用しており、耐久性があります。衣服に引っ掛かりにくいベルクロを採用。手の不自由なユーザー様に便利なサムホールが付いています。胸部、腹部、膝または下肢に使用可。各サイズ長さは共通の142cm。必要に応じてカットいただけます。

製品画像	タイプ	製品コード	価格	完成用部品
ユニバーサル・エラスチックストラップ  	ベルクロ式	SP110S (幅 8cm)	8,800	
		SP110L (幅11cm)	9,300	
		SP110XL (幅15cm)	11,000	
エラスチック延長ストラップ (長さ約72cm共通)  	ベルクロ式	SP111S (幅 8cm)	7,100	
		SP111L (幅11cm)	7,400	
		SP111XL (幅15cm)	7,700	

使用例






体幹部のサポートだけでなく下肢のサポートやセラピーでも活用いただけます。


# 取付け金具パーツ

## 1. 車いすのパイプ形状の確認

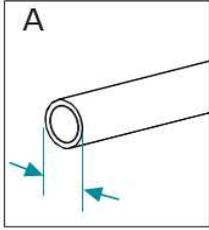


**丸パイプ**

φ 19, 22, 25, 29, 30, 32mm

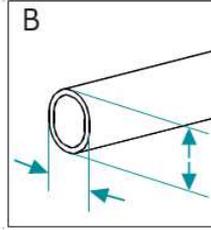


**楕円パイプ**

Quickie

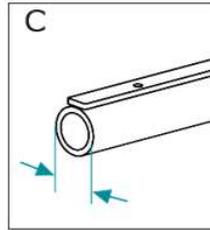


**チューブ**

座シート用ねじ穴付き

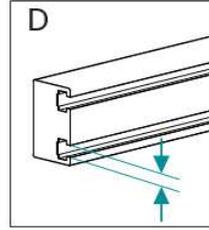

**ペルモビール社**

6mm T型スロット

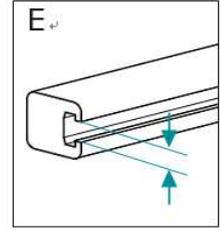

**インバケア社**

10mm T型スロット

## 2. 取付け金具の選択



### **BP フレームセーバー & クランプ**

適合パイプ形状：A

φ25mm チューブおよび同梱シムで  
22mm チューブに適合します。

19mm 用シムは別売。



### **BP フレームクランプ**

適合パイプ形状：A、C

上部開放型のユニークな形状により、  
座シートシート付フレームやアームレスト  
のパッドの下にフィットします。丈夫なアル  
ミニウム製です。22mm 用と24mm 用を  
選択ください。



### **BP バンドクランプ**

適合パイプ形状：A、B、C

フレキシブルなステンレススプリング  
は、フレームと座シートの下の隙間が  
狭い所にも収まります。

様々なパイプ形状に対応します。



### **BP シートチューブマウントブラケットキット**

適合パイプ形状：C

スリングシートやハードシートベースの車いすの  
ための取付けキット。

左右セット。





### **BP ベルト型取付け延長キット**

適合パイプ形状：全て

障害物を避けてエンド金具の取付けや、エンド金具位置の  
上下調整に便利なベルト型ブラケットです。

固定用金具込み、4本入り。

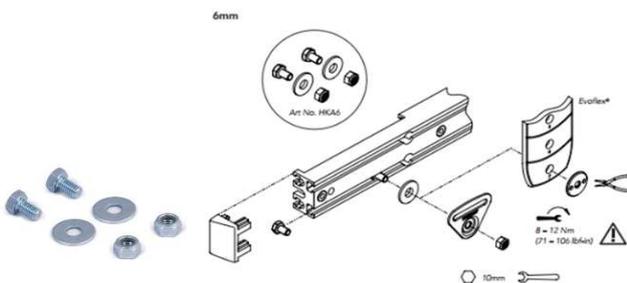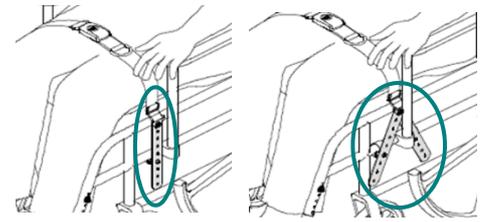


### **BP 6mm T スロット**

適合パイプ形状：D

ペルモビール社 電動車いす用取付け金具。

スロット幅を事前にご確認ください

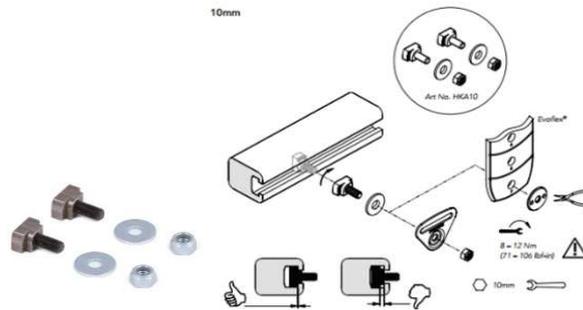

### **BP 10mm T スロット**

適合パイプ形状：E

インバケア社 電動車いす用取付け金具。




スロット幅を事前にご確認ください

単位	製品コード	価格
2セット	HKA6-1	1,500

単位	製品コード	価格
2セット	HKA10-1	1,500

製品画像	サイズ/入数	製品コード	価格	完成用部品
<b>BPフレームセーバー &amp; クランプ</b> 	各2個	HW303-B-2	1,900	
	各10個	HW303-B-10	9,200	
	各50個	HW303-B-50	44,300	
<b>BP19mm用シム</b> 	2個	HW303-19SHIM-2	1,400	
	10個	HW303-19SHIM-10	6,800	
	50個	HW303-19SHIM-50	31,700	
<b>BPフレームクランプ</b> 	22 mm	2個	HW310-22-A-2	6,300
		10個	HW310-22-A-10	30,600
	25 mm	2個	HW310-25-A-2	6,300
		10個	HW310-25-A-10	30,600
<b>BPバンドクランプ</b> 	22 Ø	2個	HW320-22-2	3,300
		10個	HW320-22-10	15,300
	25 Ø	2個	HW320-25-2	3,300
		10個	HW320-25-10	15,300
	27 Ø	2個	HW320-27X33-2	3,300
		10個	HW320-27X33-10	15,300
	29 Ø	2個	HW320-29-2	3,300
		10個	HW320-29-10	15,300
	30 Ø	2個	HW320-30-2	3,300
		10個	HW320-30-10	15,300
	32 Ø	2個	HW320-32-2	3,300
		10個	HW320-32-10	15,300

<b>BPシートチューブマウント ブラケットキット</b> 	[サイドマウント] HW200-20	[トップマウント] HW200-90		
				
BPシートチューブマウントBK サイドマウント	2	HW200-20-2	3,800	
BPシートチューブマウントBK トップマウント	2	HW200-90-2	4,200	
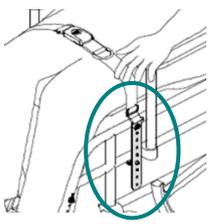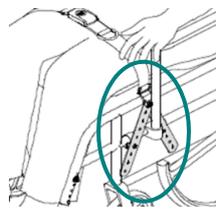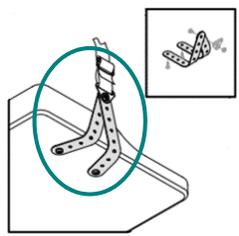
<b>BPベルト型取付け延長キット</b>  (片側2本使用)	・エンド金具の高さ調整	・障害物の回避	・ハードシートベース	
				
BPベルト型取付け延長キット	左右1組	HKA12-1	3,900	

ベルトエンドパーツ & ベルト交換パーツ


例 **HB205-M46**

ベルトの幅を表しています。\_\_\_\_ベルト幅 = **S**/2.5cm、**M**/4cm、**L**/5cm

※ベルトエンドパーツ・ベルト交換パーツをご希望の際はベルト幅を確認の上、ご注文ください。

製品画像	ベルトサイズ/入数		製品コード	価格	完成用部品
 (エンド金具・長さ調整バックルセット)	S	各2個	HKA1-R-1	1,700	
		各20個	HKA1-R-10	15,200	
	M	各2個	HKA1-G-1	1,700	
		各20個	HKA1-G-10	15,200	
	L	各2個	HKA1-B-1	1,700	
		各20個	HKA1-B-10	15,200	
	S	2個	HKA2-R-1	3,400	
		20個	HKA2-R-10	32,600	
	M	2個	HKA2-G-1	3,400	
		20個	HKA2-G-10	32,600	
	L	2個	HKA2-B-1	3,400	
		20個	HKA2-B-10	32,600	
	S	2個	FS032-2	2,800	
	M	2個	FS033-2	3,700	
	L	2個	FS034-2	4,000	

ベルト交換パーツ & アクセサリー

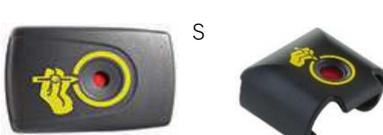
製品画像	ベルトサイズ/単位		製品コード	価格	完成用部品
 ボタンサイズφ14mm	M	1	FS018D-1	4,000	
	L	1	FS019D-1	4,000	
 ボタンサイズφ6mm共通	M	1	FS018C-1	4,000	
	L	1	FS019C-1	4,000	
	S	1	FS029C-1	4,000	
		1	SP001	10,000	
		1	BMR-42	1,900	
		10	BMR-42-10	13,000	

## 下肢サポートベルト Lower body positioning

### エアロメッシュ



下肢にかかる圧力を軽減し、挫傷を起こすことなく屈曲を制限します。  
ふくらはぎの緊張を軽減します。  
独自のAeromesh素材は通気性と耐久性に優れています。

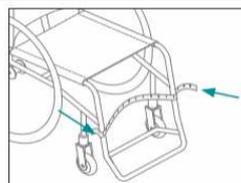

車いすの外側からたわみも含めた距離を測定。

S	35 - 40cm (14-16")
M	40 - 50cm (16-20")
L	50 - 61cm (20-24")

製品画像	サイズ/単位	製品コード	価格	完成用部品
レッグストラップ エアロメッシュ 	S	SP102S	10,000	
	M	SP102M	10,900	
	L	SP102L	11,800	
カーフパネル エアロメッシュ 	S	SP103S	13,200	
	M	SP103M	14,100	
	L	SP103L	15,000	

### アンクルハガー



新化したアンクルハガー。  
新型エルゴラッチバックル  
採用で調整も操作も簡単！  
ベルト、縫製、生地、  
全てにおいて進化しました。



くるぶし上の  
周径を計測

サイズ	足首周径
XS	5-1/2"-7" (14cm-17cm)
S	6-1/2"-8" (17cm-20cm)
M	7-1/2"-9" (19cm-23cm)
L	8-1/2"-11-1/2" (22cm-29cm)
XL	11"-13" (28cm-33cm)

製品画像	サイズ/単位	製品コード	価格	完成用部品
アンクルハガー 	XS	FT240XS	18,700	●(旧品番で掲載)
	S	FT240S	18,700	●(旧品番で掲載)
	M	FT240M	19,900	●(旧品番で掲載)
	L	FT240L	19,900	●(旧品番で掲載)
	XL	FT240XL	20,600	●(旧品番で掲載)

※左右1組

## 入浴用ポジショニングベルト Shower/bath positioning

製品画像	ベルト形式	製品コード	価格	完成用部品
1ピースシャワーベルト 	グロメット	BB111L-1	15,000	
	グロメット	BB111XL-1	15,000	
	スライダー 	BB112L-1	12,600	
	スライダー 	BB112XL-1	12,600	
2ピースシャワーベルト 	無し	BB101M-1	15,300	
	無し	BB101L-1	15,300	
バスベルトノブ 	(2個) ノブ直径38mm、M6×16mm、ステンレス	FA812-BP-2	2,300	

※グロメットタイプや2ピースシャワーベルトはバスベルトノブ等の固定パーツが必要です。

スライダータイプはパイプに巻き付けて固定するため、固定パーツは不要です。

ジョイスティックハンドル

製品画像	ステム/サイズ		製品コード	価格	完成用部品
Uシェイプ	5mm	76mm(3")	PC101A	11,500	
	6.4mm	76mm(3")	PC101B	11,500	
	5mm	100mm(4")	PC102A	11,500	
	6.4mm	100mm(4")	PC102B	11,500	
ストレートシャフト	5mm		PC104A	11,500	
	6.4mm		PC104B	11,500	
ラバードーム	5mm		PC107A	11,500	
	6.4mm		PC107B	11,500	
グループマッシュルーム	5mm		PC110A	11,500	
	6.4mm		PC110B	11,500	

Uシェイプ 3"	Uシェイプ 4"	ストレートシャフト	ラバードーム

グループマッシュルーム	

注意事項

- ・各ジョイスティック画像の()内の数字はインチ表示になります。
- ・ご利用予定機種種のジョイスティックのステム径をご確認の上ご購入ください。

**NOTE**



STRENGTHEN YOUR POSITION®

2019年6月改定

### [ Bodypointについて ]

Bodypointは車いすを使用する人々の能力と向上心をより理解するために毎日活動しています。私たちは想像し、デザインし、製品を創り出すことでハードとソフトのギャップを埋めるように、車いすと人々の間のより良いつながりを創り出しています。

創設者 - David Hintzman

日本総代理店

**Yuki Trading**

株式会社ユーキ・トレーディング

〒110-0008 東京都台東区池之端12-5-46

TEL 03-03821-7331 FAX 03-3821-7552

e-mail : info@yukitrading.com

www.yukitrading.com

- ・本カタログの内容は2019年4月現在のものです。予告なく製品の仕様、デザイン、価格が変更されることがあります。
- ・価格欄の\*印は2019年4月より価格変更となります。
- ・カタログの写真と実際の製品の色などが異なる場合がございますので予めご了承ください。