
# 脚部ハーネスの取付 取扱説明書

ART NOS. LH600S, LH600M & LH600L

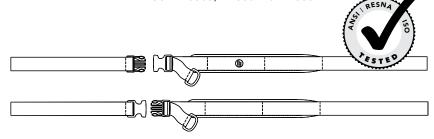

この説明書にはBodypointのすべての脚部ハーネスの安全な使用とメンテナンスに必要な重要情報が記載されています。使用者またはその介護人にこの説明書を渡し、内容を説明して、インストラクションが確実に理解されるようにしてください。

⚠ 警告!製品は有資格のリハビリ技師が取付け、固定してください。

取付けの際、本製品は以下の物と取付けてください。 FLAT-MOUNTエンド フィッティング

CINCH-MOUNTエンド フィッティング

カムバックル (体重75KGまでの使用者には2.5CM (1インチ)、すべての使用者には3.8CM (1-1/2インチ) および5.08CM (2インチ) が適切)

車椅子や座位保持装置への取付けには、オプション のBODYPOINTベルト取付けハードウェアを使用す ることができます。

▲ 警告!本製品は車椅子または作業椅子に座っている人の位置決めにのみ使用してください。輸送用安全 装置、個人用拘束装置としての使用、または故障が傷害を招く可能性のあるその他の適応での使用は意図していません。本製品の誤用は認可されず、危険です。

▲ 警告!本製品が誤って外れると、使用者が滑り抜けたり、車椅子や作業椅子から落ちたりする可能性があります。使用者の動作または認識能力によって誤って外れる可能性がある場合、使用中は常に介護人が付き添う必要があります。介護人は必ず本製品の外し方を知っておく必要があります。これができないと、緊急時に取り外しが遅れる恐れがあります。

⚠ 警告!新しい座位保持装置と同様に、この製品により人の座り方が変わる可能性があります。使用者


は、この製品が使用者に接触する部位だけでなく、仙骨、脚、臀部など圧力を受ける主な部分について、通常の圧力開放と皮膚の完全性チェックを引き続き実行しなければなりません。皮膚の赤みが増したり、炎症が起きる場合は、使用を止めて、医師かシーティングの専門家に相談してください。そのままにしておくと、褥瘡など重傷を負う恐れがあります。

メンテナンス: 縫い目、ウェビング、パッドに摩耗の兆候がないか、定期的に点検してください。大きな摩耗があった場合は、サブライヤーに連絡してBODY-POINTの認定修理または交換を受けてください。いかなる場合も、資格のない人がこの製品を変更したり、修理したりしないでください。健康と安全がそれにかかっています!

☆ (140°F)。漂白しないこと。乾燥機乾燥、低温、またはそのまま干して乾燥。アイロンをかけないこと。(洗濯中は製品を布袋に入れ、製品やマシンに傷が付かないようにしてください。)


保証:この製品には、オリジナルの消費者による正常な使用から生ずる材料および仕上がりにおける瑕疵に対する生涯限定保証が付いています。保証請求については、サプライヤーまたはBODYPOINTに連絡してください。

BODYPOINT製品の詳細情報、および米国外の販売 代理店の一覧は、WWW.BODYPOINT.COMをご 覧ください。

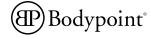



MDSS GmbH Schiffgraben 41 D-30175 Hannover Germany

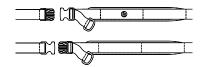


## パッケージの内容

- 脚部ハーネス
- ・CINCH-MOUNT™またはFLAT-MOUNT™エンド フ ィッティング
- · FRAMESAVER™クランプ (オプション 物品番号 FS032-2)




Ø 3/16-1/4" (5-6mm)

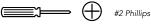

#### 取付け要件

- 2番フィリップスねじ回し
- ・最低90KG/200ポンドの引抜き強度のある取付けねじ。 同梱されていません。

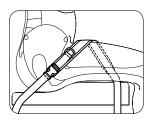

## 位置付け

使用者に車椅子に座ってもらい、姿勢を 正します。後方ストラップ端部を骨盤と 股関節近くに通して脚部ハーネスパッド を大腿部内側に配置します。パッドはシ 一トに触れなければなりませんが、脚部 下に延長したり鼠径部に触れたりしては いけません。




Ø 3/4" (19mm) HW303-19SHIM)

FrameSaver™







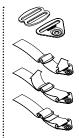


Flat-Mount™




#### 前部ストラップ

1. ストラップを大腿部の下に通し、所望の定着点をシ ートレールの前部またはシートの下に定めます。 2. エンド フィッティングを車椅子のフレームに装 着します。

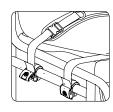


# 後方ストラップ

- 1. 上部ストラップはシートレー ルの後ろに固定しなければな
- 2. 所望の定着点を定め、エンド フィッティングを車椅子のフレ ームに装着します。

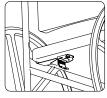


### 直接取付け

エンド フィッティングを固い座面 に直接装着することができます。取 付けねじには最低90KG/200ポン ドの引抜き強度がなければなりま せん。(同梱されていません。)

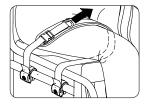

使用者の脚部ハーネスをDリングストラップで締め ます。後方エンド フィッティングのウェビングから 余分なたるみを取り除きます。正しく調節してストラ ップを締めると、ぴったり合って使用者の脚部が安 定します。

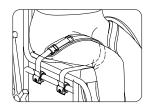

車椅子に適正に配置したら、使用者に前方や左右交互に傾いてもらい、 固定を確認します。確認事項:

- 1. バックルや調節ストラップの正常な動作。
- 2. 快適度 刺激のある領域がないか探します。
- 3. 他の装置の妨害 定着点を必要に応じて定め直します。
- 4. 傾き、折畳み、巻上げ等、あらゆる範囲の動きを通じて椅子を動かしま す。何か妨害物がないか確認します。