
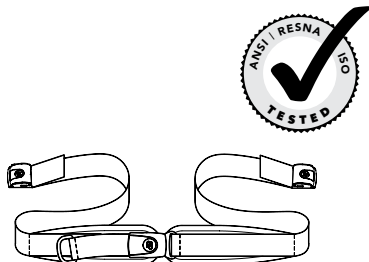


骨盤支持ベルトの取付・取扱説明書

ART NOS. HB2, HB4, LB2, LB4, NB2 & SB2

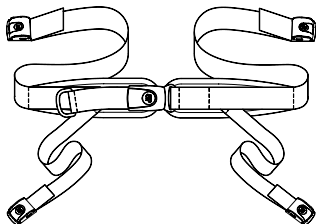

この説明書にはBodypointのすべての骨盤支持ベルトの安全な使用とメンテナンスに必要な重要情報が記載されています。使用者またはその介護人にこの説明書を渡し、内容を説明して、インストラクションが確実に理解されるようにしてください。

⚠ 警告! 製品は有資格のリハビリ技師が取付け、固定してください。

取付けの際、本製品は以下の物と取付けてください。

Flat-mountエンド フィットTING

Cinch-mountエンド フィットTING

カムバックル (体重75kgまでの使用者には2.5cm (1インチ)、すべての使用者には3.8cm (1-1/2インチ) および5.08cm (2インチ) が適切)

車椅子や座位保持装置への取付けには、オプションのBodypointベルト取付けハードウェアを使用することができます。

⚠ 警告! 本製品は車椅子または作業椅子に座っている人の位置決めにのみ使用してください。輸送用安全装置、個人用拘束装置としての使用、または故障が傷害を招く可能性のあるその他の適応での使用は意図していません。本製品の誤用は認められず、危険です。

⚠ 警告! この骨盤支持ベルトは、下部骨盤部または大腿部に常にぴったり固定しておくこと、摩耗します。ベルトがゆるいと、使用者が滑り抜けて頸部を圧迫する危険があります。シーティングの専門家に適切な調節と使用について実地説明をしてもらってください。(注: 4点式ベルトは、二次ストラップが固定されて位置の変更が防止されれば、上部骨盤部に安全に着用することができます。)

⚠ 警告! 本製品が誤って外れると、使用者が滑り抜けたり、車椅子や作業椅子から落ちたりする可能性があります。使用者の動作または認識能力によって誤って外れる可能性がある場合、使用中は常に介護

人が付き添う必要があります。介護人は必ず本製品の外し方を知っておく必要があります。これができないと、緊急時に取り外しが遅れる恐れがあります。

⚠ 警告! 新しい座位保持装置と同様に、この製品により人の座り方が変わる可能性があります。使用者は、この製品が使用者に接触する部位だけでなく、仙骨、脚、臀部など圧力を受ける主な部分について、通常の圧力開放と皮膚の完全性チェックを引き続き実行しなければなりません。皮膚の赤みが増したり、炎症が起きる場合は、使用を止めて、医師がシーティングの専門家に相談してください。そのままにしておく、褥瘡など重傷を負う恐れがあります。

メンテナンス: 縫い目、ウェビング、パッドに摩耗の兆候がないか、定期的に点検してください。大きな摩耗があった場合は、サプライヤーに連絡してBodypointの認定修理または交換を受けてください。いかなる場合も、資格のない人がこの製品を変更したり、修理したりしないでください。健康と安全がそれにかかっています!

洗濯: 洗濯機洗い、温水、60°C (140°F)。漂白しないこと。乾燥機乾燥、低温、またはそのまま干して乾燥。アイロンをかけないこと。洗濯中は製品を布袋に入れ、製品やマシンに傷が付かないようにしてください。)

保証: この製品には、オリジナルの消費者による正常な使用から生ずる材料および仕上がりにおける瑕疵に対する生涯限定保証が付いています。保証請求については、サプライヤーまたはBodypointに連絡してください。


Bodypoint製品の詳細情報、および米国外の販売代理店の一覧は、www.bodypoint.comをご覧ください。

BP Bodypoint®

EC REP


MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30173 Hannover
Germany

CE

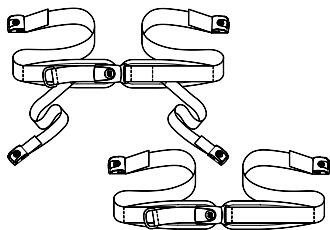

パッケージの内容

- ・ 骨盤支持ベルト
- ・ CINCH-MOUNT™またはFLAT-MOUNT™エンドフィッティング
- ・ FRAMESAVER™クランプ (オプション)


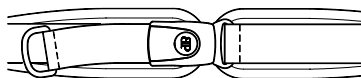


取付け

パッド入り骨盤支持ベルトは、パッドが触れるように調節ストラップを締めたままにします。パッドなし骨盤支持ベルトは、ウェビングをバックルから0.13~0.15M (5~6インチ) 引き出します。


2点式骨盤支持ベルト:

1. 所望の定着点を定めます。
2. FRAMESAVERとCINCH-MOUNTを車椅子のフレームに装着します。
3. ベルトを骨盤の中央に置き、ウェビングの端部をCINCH-MOUNTに突き通します。
4. ウェビングを堅く締めて快適にします。”

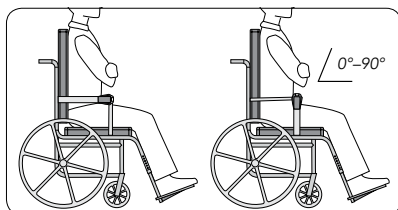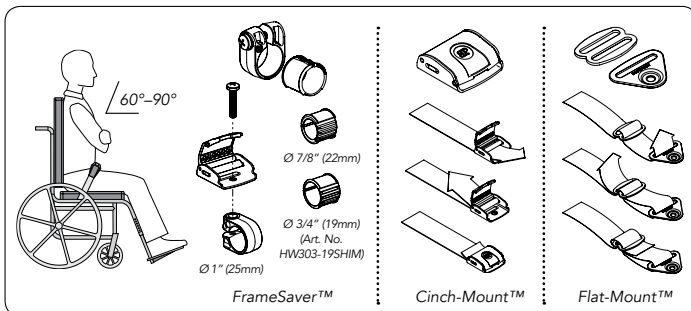


4点式骨盤支持ベルト:

1. 所望の定着点を定めます。
2. 上記の取付説明書に従って一次ストラップを固定します。
3. 一次ストラップを定着させるように二次ストラップを椅子に装着します。
4. 二次ストラップを締めて一次ストラップの動きを防止します。

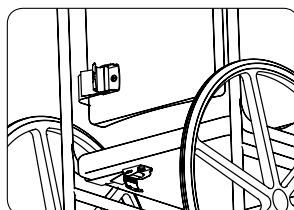

直接取付け

エンド フィッティングを固い座面に直接装着することができます。取付けねじには最低90KG/200ポンドの引抜き強度がなければなりません。(同梱されていません。)

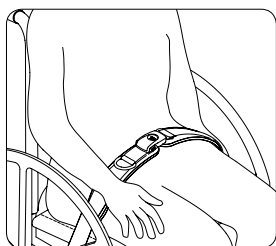

調節: 正しく調節してベルトを締めると、ぴったり合って使用者の骨盤が安定します。パッド入りのベルトの上で、緩みがなくなり、バックルの下のパッドが当たるまで、Dリング プルを締めます。長さを調節してぴったり合わせたり、クリーニングのためにベルトを外したりすることが必要な場合、ベルトのエンド フィッティングを使用して行なうことができます。

安全点検

車椅子に適正に配置したら、使用者に前方や左右交互に傾いてもらい、固定を確認します。確認事項:

1. バックルや調節ストラップの正常な動作。
2. 快適度 - 刺激のある領域がないか探します。
3. 位置 - 高すぎたり低すぎたりすれば、定着点を調節します。
4. 他の装置の妨害 - 定着点を必要に応じて定め直します。
5. 傾き、折畳み、巻上げ等、あらゆる範囲の動きを通じて椅子を動かします。何か妨害物がないか確認します。