

Sub-ASIS

パッドの取付・取扱説明書

ART NOS. PD401-2 & PD402-2




パッケージの内容

Sub-ASISパッド2個

本製品は以下の物品番号の物との使用を意図しています：

LB235-S38	LB435-S38	LB416-S38
LB205-M46	LB225-M46	LB209-M46
LB229-M46	LB405-M46	LB425-M46
LB425-M46	LB409-M46	LB429-M46
LB205-L62	LB225-L62	LB405-L62
LB425-L62		

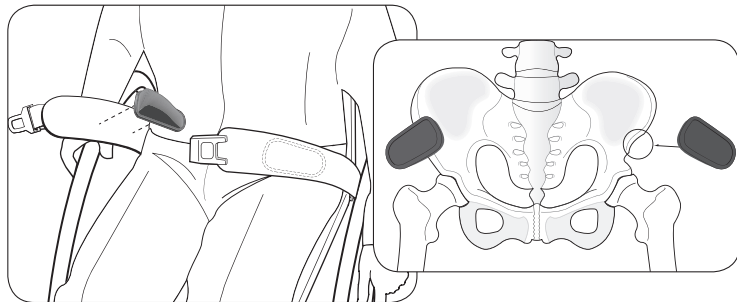


使用者またはその介護人にこの説明書を渡し、内容を説明して、インストラクションが確実に理解されるようにしてください。

⚠警告！製品は有資格のリハビリ技師が取付け、固定してください。

⚠警告！新しい座位保持装置と同様に、この製品により人の座り方が変わる可能性があります。使用者は、この製品が使用者に接触する部位だけでなく、仙骨、脚、臀部など圧力を受ける主な部分について、通常の圧力開放と皮膚の完全性チェックを引き続き実行しなければなりません。皮膚の赤みが増したり、炎症が起きる場合は、使用を止めて、医師かシーティングの専門家に相談してください。そのままにしておくと、褥瘡など重傷を負う恐れがあります。

メンテナンス：縫い目、ウェビング、パッドに摩耗の兆候がないか、定期的に点検してください。大きな摩耗があった場合は、サプライヤーに連絡してBodypointの認

定修理または交換を受けてください。いかなる場合も、資格のない人がこの製品を変更したり、修理したりしないでください。健康と安全がそれにかかっています！

 洗浄：洗濯機洗い、温水、60°C (140°F)。漂白しないこと。乾燥機乾燥、低温、またはそのまま干して乾燥。アイロンをかけないこと。洗濯中は製品を布袋に入れ、製品やマシンに傷が付かないようにしてください。

保証：この製品には、オリジナルの消費者による正常な使用から生ずる材料および仕上がりにおける瑕疵に対する生涯限定保証が付いています。保証請求については、サプライヤーまたはBodypointに連絡してください。

Bodypoint製品の詳細情報、および米国外の販売代理店の一覧は、www.bodypoint.comをご覧ください。

 Bodypoint®

 EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

 CE