

## PAL™ 体幹支持用ラテラルパッド 取扱説明書

体幹支持用ラテラルパッドは、バックレストに体幹を支持する機能を有するものと一緒を使用することで、ユーザーの安定した姿勢に保つことができる。バリライトパル(PAL・・・Positive Action Lateral)は、バリライトエボリューションバックやほかの市販されているバックレストの曲面に合うようにデザインされています。

効果的に取り付けるために、医学的な専門家が評価することをお勧めします。誤って取り付けますと、支持の有効性を無効にし体を傷つける事があります。

### バリライトパル構成部品

数量	内容
2	パッドブラケット
2	シェルブラケット
2	ヒンジ機構(スイングアウエイのみ)
2	パッド
1	六角レンチ
16	ボタンキャップボルト
8	袋ナット
8	プラスチックワッシャー
2	15cmマジックテープ(A面)
2	5cmマジックテープ(B面)

## パッドの組み立て

**洗濯可能:**パッドカバーを外して、パッドのシールカバーを取ってください。パッドとパッドブラケットの位置を決めて2本のボルトで止めてください。パッドカバーを取り付けてください。

**洗濯不可能:**パッドカバーを外して、パッドのシールカバーを取ってください。パッドカバーを取り付けてください。パッドのネジ穴に合わせてホワイトマーカで印をつけてパッドカバーに穴を開けてください。パッドブラケットとパッドを取り付けてください。

## バリライトパルの取り付け評価

15cmマジックテープ(A面)をバックレストのシェルにつけてください。シェルブラケットに5cmマジックテープ(B面)を取り付けてください。(図1)

この方法は、シェルに穴を開けることなくパッドの位置を変えて評価することができます。

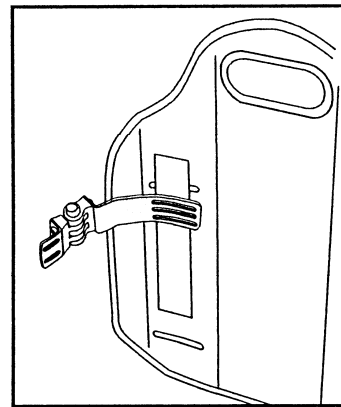


図1

## 固定した取り付け

取り付け位置が確定したら、マジックテープを取り外してください。バックレストのシェルに取り付け用の穴を4カ所開けてください。取り付けは4本のボルトを使用してください。(図2)

取り付けには、シェルブラケット毎に4本のボルトを使用し、シェルの表側にはワッシャーと袋ナットを使用してください。

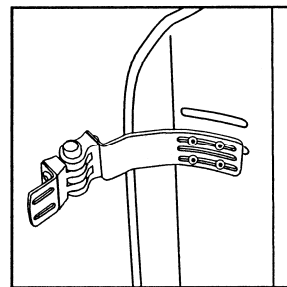


図2

## 注意:

エボリューションバックに穴を開けても、すでに開いている溝を使用しても良い。

エボリューションバックに穴を開けても、保証が無効になりません。

### パッドの角度調整

同梱されている六角レンチで、ヒンジ機構の下側のボルトを緩めて下さい。パッドブラケットの角度を決めたら、ボルトを締め付けてください。(図3)

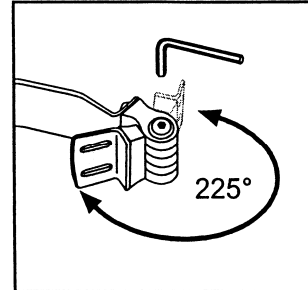


図3

### パッドの回転角度調整

同梱されている六角レンチで、パッドブラケットとヒンジ機構を取り付けているボルトを緩めてください。パッドを回転させて位置を決めたら、ボルトを締め付けてください。(図4)

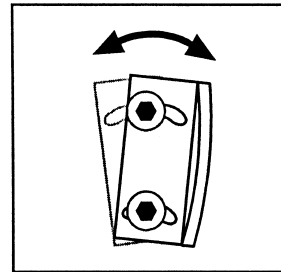


図4

### 使用方法

ヒンジ機構のボタンを押すとロックが外れ、パッドブラケットを動かすことができます。(図5)

パッドブラケットを固定位置に戻すと、カチッと音がしてパッドブラケットがロックします。このときボタンも完全に出ってきます。(図6)

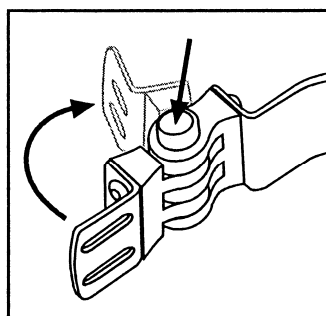


図5

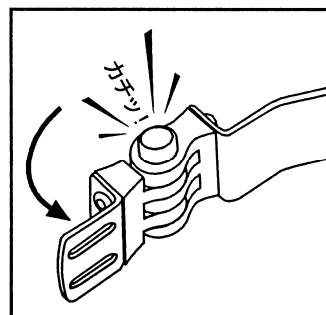


図6