

TWBL

取扱い説明書

Instructional Guide for The World's Best Niño (Pediatric) Laterals



Stealth社の[TWBL]はThe Worlds Best Lateralsの頭文字をとった製品です。

このラテラルシリーズはご利用者様の様々な要求に応えるために、
人間の手・腕・手首の動きを模倣出来るように設計されています。

今までセラピストの方々等がご利用者様の身体評価で行ったハンドリングを再現するのが
難しい場合がありましたが、[TWBL]はその際のハンドリングの場所・角度に限りなく近い形で
パッドをポジションすることが可能です。




ご使用の際は必ずシーティングに詳しい専門職(ドクター・セラピスト)
の方と一緒にフィッティングを行ってください。



[ケインマウントクランプ]

内容: オス・メスの取り付けクランプ +
六角頭ネジ(5/32インチ)2本(図1)

図1

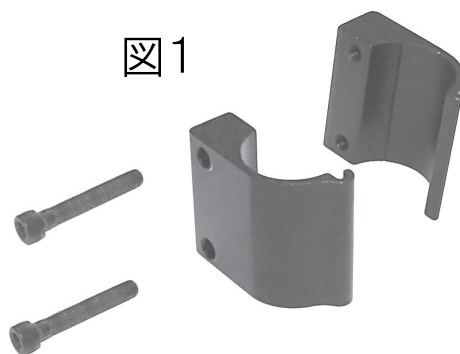

[取り付け方法]

この2つのクランプと2つのネジを使用して
パイプを挟み込みネジ止めをします(右図2)

クランプは22mm用、25mm用があります。

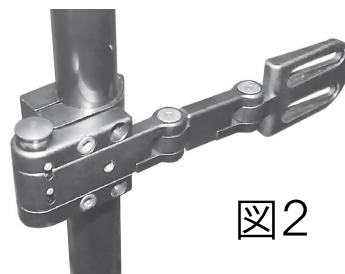




図2

注1) 必要に応じてスペーサーをご利用下さい。(別売)

[スウィングアウェイ機構]

移乗をする際に[TWBL]を180° スウィングアウェイすることができます。

図の①を押すとロックが解除され外側に開きます。
180° 開いたところで再度ロックされます。(図参照)

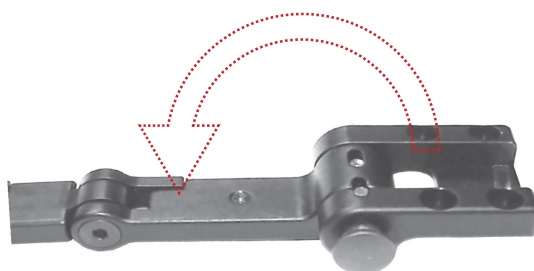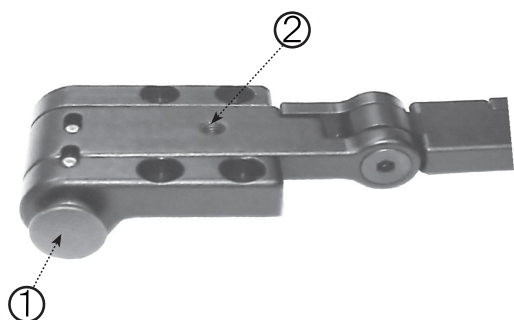

注2) ボタンを押す際に指を挟まないようにご注意ください。

注3) スイグさせる際に外側に開きますので、十分なスペースを確保してから人やものなどに当たらない場所で行ってください。

注4) ロックがかからない場合は、クランプとスイグ機構部を強くネジ止めしている恐れがあります。ロックできる強さで締めてください。

スイグ機構は金属面がくっついてしまいスイグできなくなることがあります。その際は②のネジを締め込み、くっついてしまった金属面を引き離してスイグさせることが可能です。



注5) ご使用時に②のネジを締めると金属面が合わさらず、浮いてしまうのでガタツキが起こる可能性があります。通常このネジは締めないでご利用ください。

[ラテラル調整]

2つの関節④⑤をそれぞれネジで200° 以内の角度で調整することができます。

③のパッドの位置を調整するには、カバーを外していただくと、2本のネジで前後に約40mm スライド可能です。(FSCはパッド部分を更に⑦ボールジョイントで360° 調整可能です)

⑥は前ページで説明をしている金属面を離すネジです。

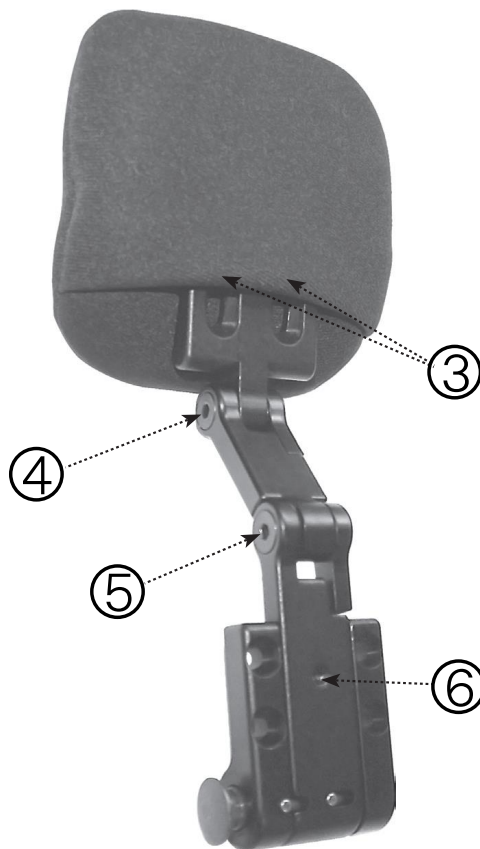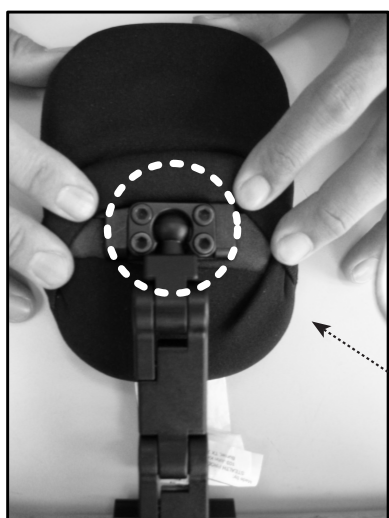

CE

Stealth Products®

Yuki Trading

株式会社ユーキ・トレーディング
東京都台東区池之端2-5-46

Phone: 03-3821-7331

Fax: 03-3821-7552

Email: info@yukitrading.com