



プロフォーム NX

ユーザーの状況に合わせてその場でカスタマイズできる画期的なモデル

ユーザーの状況や車いすの環境に合わせてその場でカスタマイズできるセミオーダークッション。

加工できるポジショニングベース、大腿パッド、ウェッジはカッターで容易にカットできます。

裏側にはガイドがあるため長さ、幅を合わせることも簡単です。

座骨部クッションは VARILITE ラインナップで唯一左右での空気量調整が可能です。



厚生労働省認可
座位保持装置完成用部品
(給付対象商品)

クッション構成



1) ポジショニングベース

コンツアー型のベースは姿勢を安定させます。裏側のガイドに沿ってカッターなどで簡単にカットできます。

2) エアフォームフローティションクッション

バルブによって空気を排出し、ユーザーの座骨部をやさしく包み込みます。唯一左右での空気量調整が可能です。

3) 大腿パッド

クローズドフォームで作られた大腿パッドはポジショニングベースの輪郭を表現しながらしっかりと大腿部をサポートします。

4) カバー

4方向へ伸縮するストレッチ素材を使用。ISO 7176-16の基準を満たした難燃性素材。


5) ウェッジ

前 5cm のテーパ型ウェッジは車いす側の座角度を変えることなく座圧、姿勢のコントロールに役立ちます。

カスタマイズ事例




骨盤の回旋など股関節に内転位に適したカスタマイズ。
骨盤の回旋により干渉する箇所のポジショニング
ベースをカットします。(ラテラル、内転防止など)
サポートが必要な箇所にパッド類を追加ください。

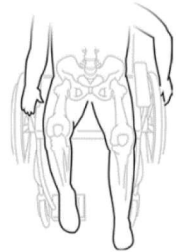


片麻痺、大腿切断、また股関節可動域制限のある方に
適したカスタマイズ。足漕ぎに適しています。
大腿パッドとウェッジの中央部をガイドに沿ってカットし
健側のウェッジを取り外してください。



左右対称で大腿部のサポートをより強化したカスタマイズ。
大腿部ラテラルや内転防止にパッドを追加するなど、
より大腿部のサポートを向上させることができます。

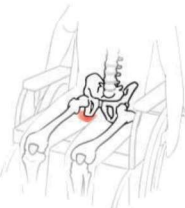

坐骨結節部に発赤や床ずれが発生した際のカスタマイズ。
患部に対応するポジショニングベースの箇所をカット、
または窪みをつけるなどして除圧を行います。
座圧測定器にて効果の確認をお勧めします。

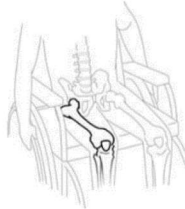

骨盤の回旋や脚長差がある場合のカスタマイズ。
大腿部の短い側の長さに合わせてポジショニングベース、
大腿パッド、ウェッジをカットしてください。



TAISコード	00468-000021
税抜価格	68,000
高さ(共通)	約12cm
重さ(40×40)	約1,000g

サイズ表

商品コード	幅cm	奥行cm
72422	30	35
74422	35	35
74622	35	40
75522	38	38
75722	38	43
76622	40	40
76822	40	45
78622	45	40
78822	45	45

※全て失禁カバー仕様です。