




**Lateral & Trunk
Support**

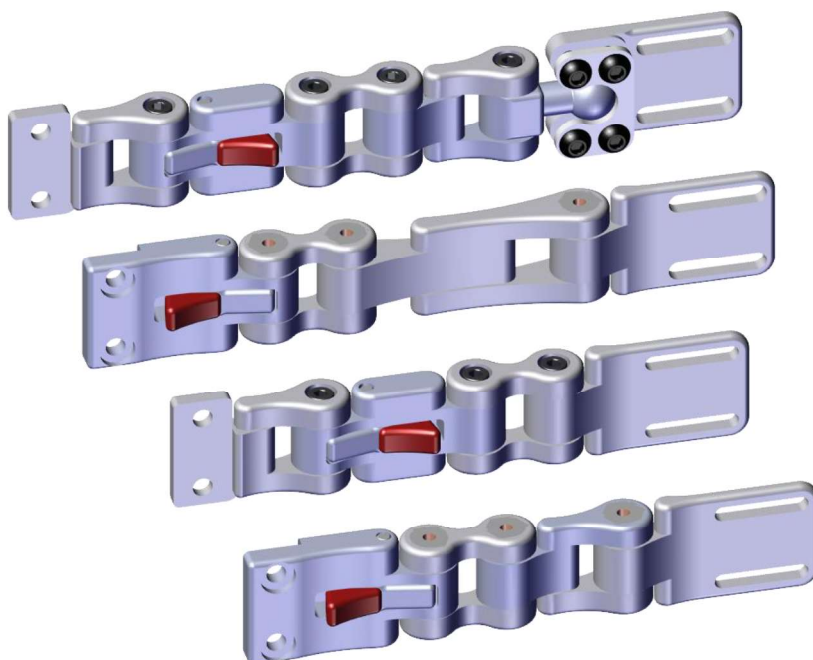

UniLink™ Laterals

製品取扱説明書

メンテナンスガイド



概要

Stealth Productsは、100%の顧客満足度を目指します。あなたの完全な満足は私たちにとって重要です。製品の品質と使いやすさを向上させるために、提案やフィードバックをお寄せください。

初めに

製品を使用する前に、すべての指示を読み、理解してください。この文書の指示および警告に従わない場合、物的損害、怪我、または死亡につながる可能性があります。製品の誤用または指示に従わなかった場合、保証は無効になります。

機能が損なわれている場合、部品が紛失または緩んでいる場合、またはいずれかのコンポーネントに過度の摩耗の兆候が見られる場合は、直ちに使用を中止してください。修理、調整、交換については販売店にご相談ください。

重要なお知らせ

1.2

これらの説明書に記載されているデバイスの取り付け、調整、および日常の使用に責任を持つすべての人は、言及されているデバイスのすべての安全面に精通し、理解する必要があります。当社製品を正しくお使いいただくために、すべての取扱説明書と警告を読み、理解し、当社の取扱説明書に従って当社製品をメンテナンスする必要があります。



注意

これらの製品は、これらのために訓練を受けた者のみが、装着、適用、および設置するように設計されています。資格のない人が装着、適用、および設置を行うと、重大なけがをするおそれがあります。

概要

製品に不具合が生じた場合

保証の対象となる製品の故障が発生した場合、車椅子販売店または(株)ユーキ・トレーディングにご連絡ください。

Tel:03-3821-7331

Fax:03-3821-7552

Mail:info@yukitrading.com

保証について

製品は、最高水準の設計、製造、生産を行っています。材料または製造上の欠陥が見つかった場合、ステルス製品は、ステルスの裁量で製品を修理または交換します。商品性、特定目的への適合性の黙示保証を含むいかなる黙示保証も、本保証の期間を超えて延長されないものとします。ステルス製品は、以下に起因する損害の保証はいたしません（ただし、以下の条件のみではありません）。

- ・ 製品の誤用、乱用、誤使用、および／またはステルス・プロダクツLLCの書面による承認なしに製品を改造した場合。
- ・ 改造やシリアル番号の変更、欠落（該当する場合）は、自動的にすべての保証を無効にします。

Stealth Productsは交換部品に対してのみ責任を負い、発生した人件費に対して責任を負いません。

Stealth Productsは欠陥のある材料や製造工程による不具合に対して保証します。

カバー: 2年間

ハードウェア: 5年間

電子機器: 3年間

保証書 UniLink™ Laterals				
販売店	会社名		購入日	年 月 日
	ご住所	TEL ()		
お客様	お名前		年齢	歳
	ご住所	TEL ()		

概要

使用目的

人体の体幹部分は、姿勢のためのポジショニングにとっても重要な部分です。良い姿勢とは、重力に対して身体のバランスを取った結果です。姿勢を改善することによる長期的な目標は、圧迫を緩和し、整形外科的な影響を最小限に抑え、筋肉の緊張を正常化し、活動するために必要な筋力を適正に近づけ、ユーザーの全体的な機能を向上させることです。

ユニリンク™ラテラルサポートは、高度に調整可能な胸部側面サポートで、椅子に座った状態での安定性とバランスを高め、触覚を思い出させ、体幹の柔軟な側屈を矯正するために使用します。この製品は、ユーザーを機能的な姿勢に保つための正確で耐久性のある手段を提供し、姿勢の崩れを防ぎ、一日を通して繰り返しポジショニングを行う必要性を減少させます。

この取扱説明書は、本製品のオプションと発展性を説明するものです。

取扱説明書は、標準的な構成で使用することを想定して書かれています。また、安全性やメンテナンスに関する重要な情報、使用中に発生する可能性のある問題についても記載されています。さらに詳しい情報、またはより高度な用途については、車椅子販売店または(株)ユーキ・トレーディングにお問い合わせください。

この取扱説明書は、必要に応じて参照できるよう、常に保管してください。

すべての情報、写真、イラスト、および仕様は、印刷時における製品情報に基づいています。この取扱説明書に記載されている写真やイラストは代表例であり、製品の各部を正確に描写するものではありません。

Stealth ProductsおよびUniLinkは、Stealth Products, LLCの登録商標です。

概要	i
初めに	i
重要なお知らせ	i
製品に不具合が生じた場合	ii
保証について	ii
使用目的	iii
目次	iv
注意喚起のラベル	v
注意喚起のラベル	v
有限責任	v
テスト	v
デザインと機能	1
ラテラルの操作	1
パッド位置の調整	1
取り付け	2
スタンダードトラックマウント	2
スタンダードケインマウント	2
オールシーズンマウント	3
フルサーフェスコンタクト (FSC) マウント	3
初めてお使いになるときに	4
販売店の支援	4
ユーザーテスト	4
使用条件	4
メンテナンス	5
洗浄	5
メンテナンス	5

注意喚起のラベル

注意喚起のラベル

注意喚起のラベルは、ユーザー、クライアント、オペレーター、および財産の安全のために記載されています。危険、警告、注意、注記、安全の各ラベルの意味と、ユーザー、周囲の人、財産に与える影響を読み、理解するようにしてください。

 危険	避けられなければ 重大な傷害、死亡、および物的損害 をもたらす 差し迫った状況 を示します。
 警告	避けられなければ 重大な傷害、死亡、および物的損害 を引き起こす 可能性のある状況 を示します。
 注意	避けられなければ 軽度から中等度の傷害および物的損害 をもたらす 可能性のある状況 を示します。
注記	負傷に関係しない重要な情報を識別しますが、 物的損害の可能性のある状況 を示します。
安全	安全な作業のための手順や指示、安全な手順の注意、または必要と思われる重要な安全装置を示しています。

有限責任

Stealth Productsは、ユーザーまたはその他の人がこのマニュアルに記載された推奨事項、警告、および指示に従わなかったことによって生じた人身傷害または物的損害について、一切の責任を負いません。

Stealth Productsは、エンドユーザーへの製品の最終的な組立ての責任を持ちません。また、ユーザーの死亡または負傷に対して責任を負いません。


テスト

初期設定と運転は、ユーザーが完全に安全運転できるようになるまで、障害物のない開けた場所で行ってください。

ラテラルの操作

ラテラルを操作するには

1. クイックリリースボタン(A)を押します。

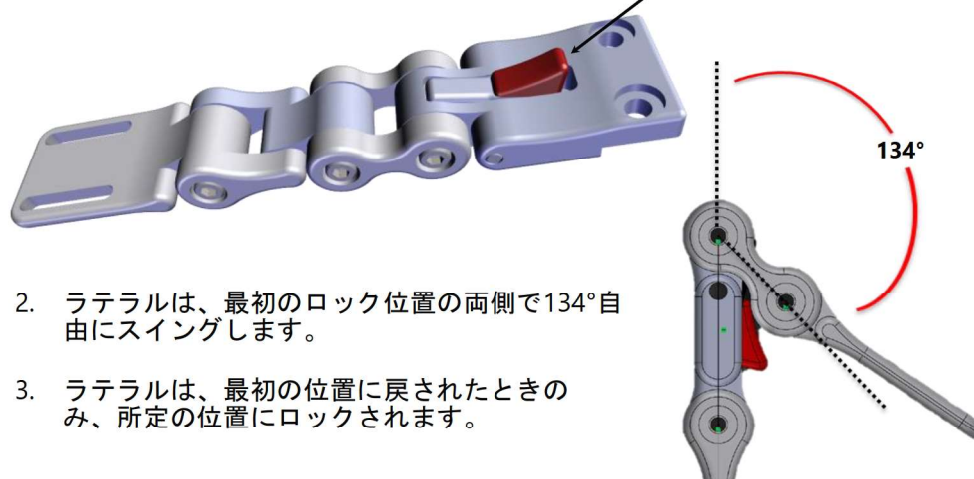


2. ラテラルは、最初のロック位置の両側で134°自由にスイングします。
3. ラテラルは、最初の位置に戻されたときのみに、所定の位置にロックされます。

パッド位置の調整

スタンダードラテラルには、3か所の調整ポイントがあります。
リンクBとCを調整する場合は以下の通りです。

1. (B)と(C)のM5 x .8 x 25mm六角穴付ボルトを少し緩めます。
2. 望みの角度を設定し、M4六角レンチでネジを締め直します。

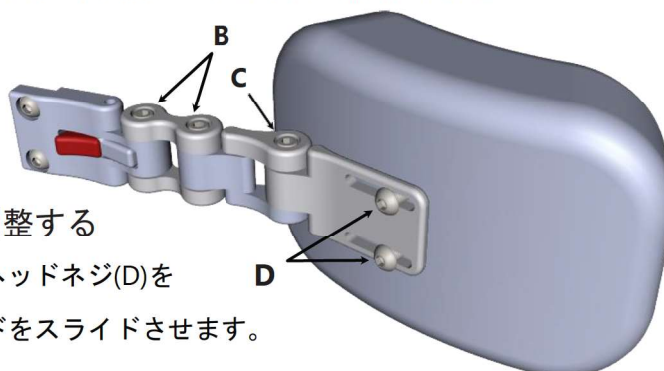


パッドの前後を調整する

1. 2つのM6ボタンヘッドネジ(D)を少し緩め、パッドをスライドさせます。
2. ネジを締め過ぎないように締め直します。

取り付け

スタンダードトラックマウント


1. M6x1.0x12mm六角穴付ボルト (A) をカウンターボアホール (B) に通し、ユニバーサルトラックナット (C) のネジ穴に挿入します。
2. 望みの位置にセットし、M4六角レンチでネジAを締めます。
3. 高さを調整するには、ネジを緩めて新しい位置までスライドさせ、ネジを締め直します。

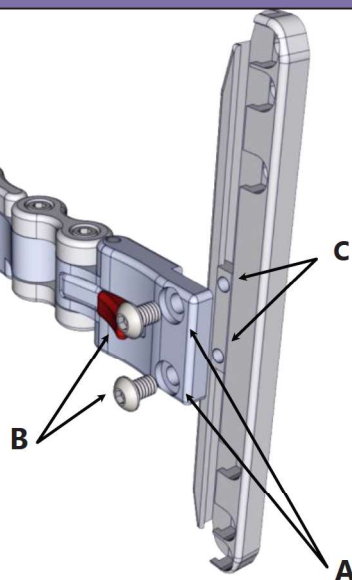

スタンダードケインマウント

スタンダードケインマウントの取り付けと調整は以下の通りです。

1. M6x1.0x20mm六角穴付ボルト (A) をカウンターボアの穴からチューブクランプ (B) のオス側に挿入し、チューブクランプ (C) のメス側にはめ込みます。

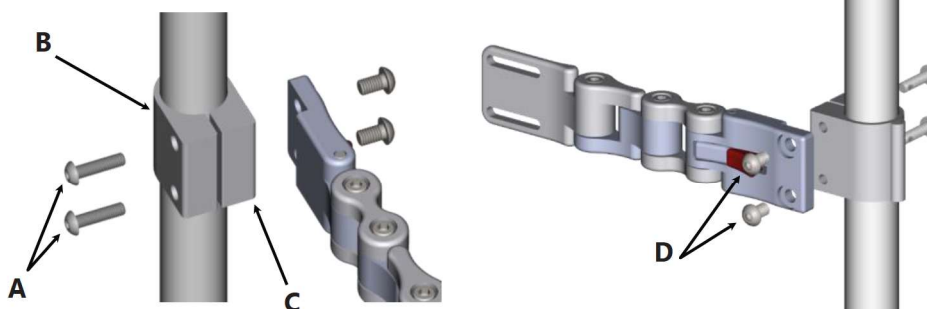


2. M6x1.0x12mm六角穴付ボルト (D) を使ってラテラルを取り付け、ケインクランプのメス側に直接取付けます。M4六角レンチで締めます。
3. 高さを調整するには、M6x1.0x20mm六角穴付ボルト (A) を緩め、クランプを上下させ、ネジを締めます。

取り付け

オールシーズンマウント

オールシーズンマウントの取り付け・調整

1. M6 x 1.0 x 12mm平頭ネジ(A)を使い、オールシーズンブラケットを車椅子に取り付け、M4六角レンチで締め付けます。

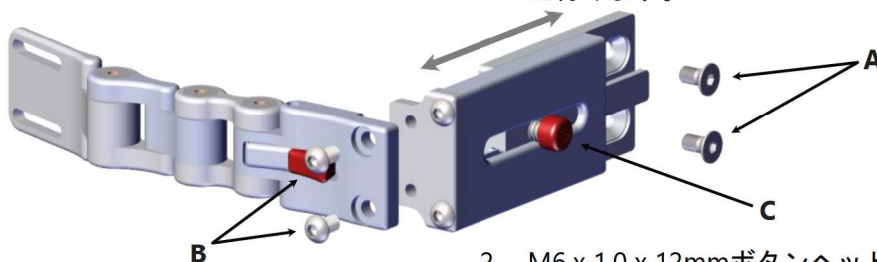

2. M6 x 1.0 x 12mmボタンヘッドネジ(B)を使用し、ラテラルをオールシーズンブラケットに取り付けます。M4六角レンチで締めます。

3. 赤いボタン(C)を押してマウントをスライドさせ、0.5インチ単位で横方向の調整を行います。


フルサーフェスコンタクト(FSC)マウント

全面コンタクトマウントは、あらかじめ組み立てられて出荷されます。パッドの角度調整については以下の通りです。

1. M4六角レンチでM6 x 1.0 x 12mmボタンヘッドスクリュー(A)を緩めます。

2. パッドを回転させ、希望する角度に調整します。

3. 全てのネジを締めます。

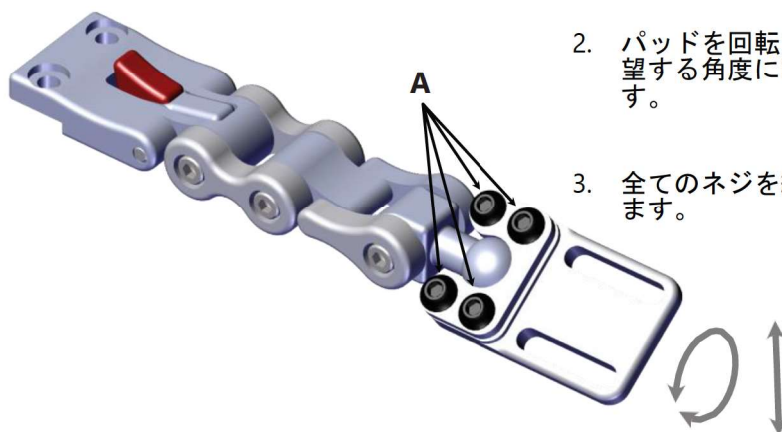

販売店の支援

ユーザーによる初回使用時には、販売店またはサービス技術者が製品を組み立てるだけでなく、ユーザー（ユーザーおよび／または付添人）に対してユーザーのポジショニングの設定について説明することを推奨します。必要に応じて、販売店が最終調整を行う必要があります。



注意

ラテラルの取り付けや調整は、車椅子販売店やサービス技術者のみが行ってください。

ユーザーテスト

ユニリンクラテラルの取り付け方法、使用方法、ユーザーが快適に使用できるような調整方法を十分に理解することが重要です。販売店として、以下のように進めてください。

- どのように取り付けたかをユーザーに説明し、機能を説明します。

ユニリンクラテラルを試用する

- パッドはユーザーにとって適切な位置にありますか？
- 全ての動作を安全に、最小限の力で実施できますか？

必要に応じて、位置の調整を実施してください。

ユーザーに、考えられる問題点とその対処法を説明します。

使用条件

ユニリンクラテラルは、本書に記載された設置方法に従って販売店が設置した状態での使用を想定しています。

- 予期される使用条件は、初回使用時に販売店またはサービス技術者からユーザーまたは付添人に伝えられます。
- 使用条件が著しく変化した場合は、過度の消耗や意図しない破損を避けるため、販売店または認定サービス技術者に連絡してください。

メンテナンス

クリーニング

カバーの洗浄について

- ラテラルからパッドとカバーを取り外します。
- 洗濯機の弱水流モードで洗い、絞らず自然乾燥させます。

注記

アイロンがけ、漂白は**禁止**です。

メンテナンス

ネジの緩みや金具の磨耗がないか定期的に点検してください。

パッドやカバーに不具合がないか定期的に点検してください。

埃や汚れは湿らせた布で優しく取り除きます。

安全

必要に応じて、部品の交換や修理を行ってください。

注記

ユニリンクラテラルは、ユーザーの体重が113kgを超えない範囲で機能するように設計されています。この範囲を超える場合については、販売店または営業担当にご相談ください。



Revision Date: Jul 20, 2020